

德国贝朗动静脉留置针Introcan-W英初康18G直型密闭式带翼

产品名称	德国贝朗动静脉留置针Introcan-W英初康18G直型密闭式带翼
公司名称	上海掌动医疗科技有限公司
价格	6.00/支
规格参数	品牌:贝朗 型号:英初康18G 产地:德国
公司地址	上海市静安区汶水路40号12、28、37幢146、147室
联系电话	021-51601230 13816458218

产品详情

德国贝朗 动静脉留置针 英初康18G

直型密闭式带翼 针头：1.3 × 45mm 绿色

货号：4254139B 包装：50支/盒，200支/箱，1000支/件

德国贝朗 动静脉留置针 英初康18G 产品介绍：

德国贝朗动静脉留置针由导引针、外周血管内导管和保护鞘组成。导引针采用不锈钢铬镍钢材料组成，外周血管内导管采用PUR或FER制成，保护鞘及导管座由PP制成，针座由ABS制成。

本产品为外周静脉输液，多次输液用。德国贝朗静脉留置针导管材料使用PICC，PICC一般可以用于人体器官一般大部分的血管的留置。

德国贝朗 动静脉留置针 英初康18G 产品优点：

PICC分子相容性好，PICC导管进入血管后会软化程漂浮状。

普通24G针管的常规物流量可以达到其他材料针管22G的流量：

进入血管后PICC导管会自动软化50%

进入血管后PICC导管会增加流速50%

德国贝朗静脉留置针针头材料选用德国钢材，针头打磨为7刀打磨。（普通针为4刀）

大大降低针头误刺的发生率

德国贝朗 动静脉留置针 英初康18G 穿刺手法：

拇指和中指捏住回血室

食指扣住推送

30度-45度角进针。进针速度较慢防止透壁

进针见到回血后压低角度，贴近皮肤，但不要压上皮肤向前平推2-5毫米。（*PICC导管进入血管）

拇指和中指固定住。食指推送推送板把导管送入血管

暗压止血：用食指按住导管出液口和血管交接处

中指按住 食指扶针座

抽出针芯，拧紧肝素帽