

输液报警器

产品名称	输液报警器
公司名称	徐州康福尔电子科技有限公司
价格	99.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市泉山区矿大科技园503
联系电话	0516-83892528 18068736685

产品详情

淘宝采购地址：<http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.0.6yjsoe&id=19806437403> 运用说明书

——kfr-s1型输液报警器

适用范围：医院、诊所和家庭

商品功用：

实时报警输液过程中输液管内药液液位，当药量低于报警器检测口时，报警器就会宣布报警信号提示患者或医护人员注意及时替换药水或中止输液。

商品特色：

- 1、体积小、功耗低、重量轻、功用安稳、操作便利。
- 2、可充电聚合物锂电池供电，绿色环保。
- 3、选用红外液位传感器技能，不怕强光搅扰。
- 4、液位光学监测，不触摸药液，运用安全可靠。
- 5、低电量检测功用，确保报警的高可靠性。

报警方法：

[1]空管报警：输液管空则报警，不然中止报警，即检测即报警，报警声响为“滴--滴”声；

[2]低电量报警：低电压时报警，确保机器作业的最低电压，以进步可靠性，报警声为“滋—滋”声。

运用说明：

- 1、承认输液现已开端，输液管内气泡现已排完，将输液报警器放置在药瓶与输液管点滴罐之间；
- 2、用手指将输液管平稳压入输液报警器下面卡槽，盖上压板，发动报警器；
- 3、输液结束时输液报警器宣布报警声，提示患者或医护人员注意及时替换药水或中止输液。

注意事项：

- 1、请不要将硬物放入输液管卡槽内！
- 2、输液报警器为精细设备，非专业人员请勿拆开！
- 3、如在开机状况下装置输液报警器，则仪器默以为报警状况，当输液管有药液流往后中止报警！
- 4、请不要运用不符合商品质量标准的伪劣全能手机充电器给输液报警器充电，避免形成仪器损坏！
- 5、运用过程中要当心操作，不要将药液洒入输液报警器内！
- 6、假如正常运用后机器依然处于报警状况，换一个方位后则中止报警，能够的原因是输液管质量误差管

壁厚度不均形成的，在机器反响正常的方位仍可正常运用！

7、当本输液报警器发生“滋--滋”声时，则表明报警器需求充电，充电时刻大概一个小时即可

！