

让近视的人 也能拥有美丽闪亮的色彩 任何光度的彩色隐形眼镜

产品名称	让近视的人 也能拥有美丽闪亮的色彩 任何光度的彩色隐形眼镜
公司名称	武汉伟博科技开发有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:伟博 材质:hema 规格:副
公司地址	江岸区江汉一路义成大厦4单元3楼2-3号
联系电话	86 27 82775572-8020 18917037637

产品详情

我店的美瞳不仅有平光和还有光度！

请各位亲拍前先与旺旺客服whweb联系，

以确认你订的花型是否有货！

订货量(副) 价格(不含运费)

50-99 20.00元/副

100 15.00元/副

含水量：42% ± 2%

直径：14.0mm

bc：8.30-8.90mm

产品注册证名称：软性亲水接触镜

规格型号：cosmetic

生产商名称：韩国new bio co.,ltd.

注册号：国食药监械（进）字2007第3220539

产品标准号：yzb/kor1724-2006《软性亲水接触镜》

产品特点：

- 色彩和图案采用精心设计，立体自然，镜片颜色和覆盖虹膜的纹路逼真清爽，效果出众；
- 7种颜色生动莹亮，尤其适合亚洲人；
- 清澈蓝、晶莹紫、郁金香可以变幻眼睛颜色，时尚飞扬；琥珀棕、千叶绿色彩隐约，别有韵味；极夜黑、淡墨灰含蓄魅惑，提高眼睛的光泽和质感；
- 含水量高，蛋白吸附少，时尚且健康。
- 理想适中的直径设计，标准中心厚度，易于操作，配戴轻松。

戴镜指南

一、配戴隐形眼镜前注意要点：

- 1.配戴和除下镜片前须洗手。
- 2.用洁手液洗擦手掌、手背、手指及指甲约20秒后用清水清洗干净。
- 3.洗手后必须实时处理隐形眼镜，切勿于洗手后接触其它物品，以免沾上细菌。

二、清洗隐形眼镜步骤注意事项

- 1.清洁镜片时，先以隐形眼镜护理液滴在镜片上，以食指上下轻搓镜片的两面约15秒。切勿以指甲触及镜片。
- 2.再以隐形眼镜护理液冲洗镜片，请根据护理液包装上的说明及指示的方法。冲洗后，将隐形眼镜放在已清洁的眼镜盒内，镜片必须完全浸透于护理液中。
- 3.大部份护理液开瓶后3个月必须弃掉。具体请看产品包装说明有写的。
- 4.镜盒须每天以清洁剂洗清一次，每星期则要消毒镜盒一次。每三月更换新的镜盒。

三、判断镜片的正反面（置于指尖）

镜片正反面请分辨镜片形状，正圆形即是正面，若镜片边缘向外翘起即是反面。（左边为正面，右边为反面）

四、镜片配戴方法

清洁双手后，将镜片放在食指指尖上，注意正面朝上双眼注视前方，双手中指将上下眼睑拉开，然后将镜片附着于角膜中，然后移开食指再往下看以使镜片附着于眼睛上，双手中指徐徐放松眼皮。

五、镜片卸下方法

双手洗净后，眼睛看着镜子，以左手食指右手中指拉开上下眼皮右手拇指与食指轻轻按住镜片下缘两侧使镜片拱起后慢慢取出。

如果长期不用，必须在30天左右换下护理液。保持干净。