

海昌-彩点-彩色隐形眼镜 大美目美瞳

产品名称	海昌-彩点-彩色隐形眼镜 大美目美瞳
公司名称	丹阳市康达利眼镜有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海昌 材质:polykacom 规格:1片/瓶
公司地址	华阳眼镜市场 1 区 2 4 2 号
联系电话	6500647

产品详情

丹阳市康利达眼镜有限公司是一家专业批发隐形眼镜及隐形护理产品的公司。自2003年成立以来，倡导“清新舒适每一天，健康新体验”的隐形眼镜安全配戴的方式。目前公司拥有抛弃型镜片、常戴型镜片、角膜美容镜片以及高效能免揉搓除蛋白护理产品系列。以长期合作发展，共同开拓市场为理念，一方面向国内各知名隐形眼镜生产企业合作引进高质量的产品。一方面同各眼镜零售批发商携手并进共同发展，并同时提供完善的培训教育和服务。以期待能以更健康舒适的品质为中国广大隐形眼镜消费者提供更好的产品，以先进完善的管理为广大客户提供更优质的服务。现公司代理和经销的品牌有：卫康、博士伦、海昌、强生、保视宁、蓝精灵、艾爵、康视达等品牌隐形眼镜和护理液。凯达，亮视，欧博，佳汇佳伴侣盒及隐形清洗器

怎样指导隐形眼镜配戴者

隐形眼镜属于医疗用品，若有使用不当则直接危及配戴眼的安全，故在配发时应尽可能向配戴者晓之厉害，并全面地向其交代下述使用隐形眼镜的注意事项。1.每次操作镜片之前须认真洗手。2.保持指甲短而修剪光整。3.在干净、平整的桌面上护理或戴摘镜片，以免脱落在地上。4.每次配镜之前，养成仔细观察镜片有无破损、异物及严重沉淀物的习惯。若镜片已破损则一定不要勉强配戴。若镜片有异物或沉淀物，则须处理清洁后再戴。5.分辨镜片的面向，使镜片的内曲面朝向角膜。若镜片戴反则有镜片移动过大、视力模糊和异物感等症状。6.双眼镜片屈光度不同时，取下镜片后分清左右，将其放入相应的镜片盒中。如果发生左、右镜片混淆时，可任意取一只镜片戴在光度较深的眼上，取下镜片再戴上另一只镜片，视力清楚者为光度较深的镜片，视力稍差者为光度较浅的镜片。如自己分辨不清，则只有请验配师借助焦度计来测定镜片度数。7.持之以恒地依照规定的程序清洁、冲洗和消毒储存镜片。不得省略清洁和冲洗环节，且须充分揉搓和冲洗镜片，消毒时间要充足。8.浸泡消毒过镜片的陈旧护理液一定要倒弃，不可重复使用。9.每周务必用蛋白酶片处理镜片，且在用蛋白酶片溶液浸泡的前后均须充分地清洁和冲洗镜片。10.多功能护理液在开瓶用后，每次用完应及时盖子盖紧，不要使瓶口触及手指和镜片盒等。500ml包装的药水大约应在3个月内用完，如果没有用完，则应弃去。11.务必避免使用自来水、蒸馏水、矿泉水、陈旧的无防腐剂的生理盐水及品质低劣的镜片护理液保养镜片。12.软性隐形眼镜必须采用日戴的方式使用，每晚摘下镜片，清洁保养。13.禁洗涤净、肥皂粉等其他代用品清洁镜片。禁用酒精、过氧乙酸

等其他代用品消毒镜片.14.戴隐形眼镜不得滴用任何眼药水(润眼液除外),因为眼药水中的防腐剂等成分吸附在镜片上,不仅可使镜片变色变硬,也会伤及眼部组织.15.镜片长期不使用,须经严格地清洁、冲洗、消毒,并储存在多功能护理液或其他规定的储存液中,每1-2周更换一次储存液.再次配戴之前应充分地清洁、冲洗和浸泡消毒.16.每次取出镜片后,用新鲜的多功能护理液认真地盒冲洗镜片盒,将盖子盖好备用.每1-2周用清洁的专用牙刷将镜片盒的内外用肥皂刷洗干净,用沸水浸烫,保持镜盒清洁卫生.17.需要化妆的女士,应在化妆之前配戴镜片,在取下镜片后卸妆.尽量避免化妆品污染镜片.18.隐形眼镜不要借给别人使用,因为镜片可为传染眼病乃至全身病的媒介.且镜片被别人配戴后,就回沾上别人泪液中的抗原蛋白,造成配戴后的不适感和并发症.19.不要使用振荡器等工具清洁镜片,不同波长和频率的机械波对软镜材料的破坏是难以预计的,事实证明用手指揉搓的方法来清洁镜片仍是最有效的护理手段.20.不要使用镊子和棍棒等辅助工具处理镜片,因为镊子如果不包裹尖头,很容易伤及镜片,而镊子与棍棒的包裹物.如硅胶及软塑料等极易附着沉淀物和细菌,且为病原微生物良好的培养基,并间接污染镜片,导致眼并发症.最理想的方法仍是将用充分洗干净的手操作镜片.21.当镜片发生对折粘连时,不要用力撕扯,强行剥开.可把镜片放在手掌上,滴上几滴多功能护理液,耐心地推按镜片,使其打开.如不奏效,可将镜片充分清洁冲洗后,用沸水浸泡,使其自然张开