

西门子助听器 西门子AMIGA 176AO助听器 西门子盒式助听器

产品名称	西门子助听器 西门子AMIGA 176AO助听器 西门子盒式助听器
公司名称	广州得源医疗器械有限公司
价格	288.00/台
规格参数	
公司地址	广州市荔湾区花湾路638-680号A1、A2栋2层225房
联系电话	020-81191816 13725373740

产品详情

友情提醒：本公司为了回馈各位新，老客户对本公司的支持，助听器系列将低价格出售，全国包邮！助听器系列暂不支持网上订购，如有带来不便之处，请各位买家体谅！

如有需要订购请与客服联系！

买家须知：

- 1、本店包邮产品默认发“申通快递、圆通快递”（快递可以送到请买家在拍前自行备注说明，）。不接受其它快递
- 2、申通快递不到之处或者急需发其他快递，请买家自行加8元，我们将为您发你所需的快递，没有补加8元运费的我公司有权不发货。

关于选配助听器方面经验推荐:

【产品品牌】 西门子盒式助听器 (176ao型)【适用人群】 平均听力损失不大于100分贝的中度到重度的弱听人士【产品说明】 特为中老年用户设计，具有方便的大型高低音选择钮，和大型的音量电位器，调节起来十分方便！小巧精致，寻呼机式外观设计随声听式黑色导线和耳机，每台机器均配有大中小3个不同大小耳塞，适应不同耳孔大小，特大柔和方便型音量电位调节器，携带方便金属扣，经济型5号电池。配有连续高低音可调和自动增益控制，噪音低，音质好，大声音不吵人，是西门子模拟盒式助听器性能最好的型号。【机器特点】 1.小巧精致，寻呼机式外观设计2.随声听式黑色导线和耳机3.特大柔和方便型音量电位调节器4.携带方便金属扣，经济型5号电池5.176ao内置卓越性能的输出型自动增益控制及电感线圈

，大声音不振不吵6.适用于中度到重度弱听人士【注意事项】1.如果听到啸叫声 请检查耳塞（硅胶）的大小是否合适，是否塞紧，这点最重要！一定要记住：因漏气会形成自激反馈而导致啸叫，一定要塞紧；2.尽量把音量调小一点，一般不要开到最大声，只要听得清就行；3.长时间不使用，请把电池取出，以免电池腐烂侵蚀助听器部件；4.请定期清洁耳塞或耳模以保证助听器的正常使用；5.防震、防摔、防潮、防高温；6.远离噪声源；7.尽可能接近谈话者；8.选用助听器最好通过验配师。【使用说明】1.听力鉴别：助听器不是普通商品，应该遵循科学的验配步骤。准确的进行听力状况鉴别是科学选配助听器的首要条件。听力鉴别的手段主要是通过听力测试和病史了解。最常用和最重要的听力测试方法是进行纯音听力测试（pure tone audiometry, pta），通过纯音听力测试，获得听力图，验配师就可以对听力障碍患者的听力损失作出评估。（如何理解听力损失级别，后续）进一步的，验配师会对患者的病史和助听器佩戴历史进行了解，这些信息对于准确的选配好助听器都是很有帮助的。2.助听器选配：接下来，验配师会根据患者的听力损失程度，确定所需要使用的助听器的功率大小、线路类型，并且同患者讨论，决定助听器的外形类型等问题，最终确定是使用耳背式，还是定制式助听器。（不同种类助听器的区别，后续）然后，验配师会根据患者的听力情况，对助听器进行参数调整，电脑编程助听器还可以借助电脑程序对助听器的多项参数进行精确编程，使之适应患者的听力损失。调整好参数的助听器就可以由患者试听了。如果需要，验配师还会根据实际情况对助听器参数做一些微调，使患者听得清楚、舒适。3.积极康复：买回家的助听器是不会马上发挥最好性能的，这一点助听器使用者和家属都应该有心理准备，并且正确对待。对于每一个人，新配的助听器都会有一个适应的过程，这个过程长短因人而异，短的几天，长的可能要几个月。在这个过程中，验配师会和助听器使用者继续沟通，再次调整助听器，并且给使用者一些指导，帮助使用者顺利渡过适应期，达到听力康复。在这期间，家人的配合尤其重要！助听器使用者对于新的助听器的声音还不适应，家属同他/她说话的时候稍微慢一点，说清楚一点，但并不需要大声说，更不要因为一些字句没有听清而责备他/她。这样只会增加使用者的心理负担。在康复期间，只要助听器使用者、家人和验配师应该一起努力，积极康复，一定能够帮助听力障碍患者顺利的渡过适应期，重新回到多姿多彩的有声世界！【技术数据】声增益 59db谐波失真 <7%等效噪声 <32db最大声输出 131db电池 5号电池，1.5v线圈灵敏度 109db工作电流 <10.8ma验配范围：100分贝【小提示】西门子助听器176ao、助听器172n、西门子助听器vita118这三款产品之间的区别：118型：大功率100分贝，适合中重度弱听人士，稍微大声说话能听见。172n型：大功率100分贝，适合中重度弱听人士，比较大声说话才能听见。176ao型：大功率100分贝，比172多了微调降噪功能，适合中重度弱听人士，比较大声说话才能听见。