

# 秀儿早早孕试纸 验孕试纸 另 秀儿排卵检测试纸

产品名称	秀儿早早孕试纸 验孕试纸 另 秀儿排卵检测试纸
公司名称	北京奥祥利达商贸有限公司
价格	.00/条
规格参数	类别:早早孕试纸 规格型号:简条 生产厂家:广州万孚生物技术
公司地址	北京市丰台区宋庄路26号院11号楼20层2008
联系电话	暂无

## 产品详情

### 秀儿hcg胶体金早早孕检测试纸

通过美国fda、欧盟ce认证，产品畅销全球市场！

· 产品特性 可早期检测出妊娠，受孕着床后3天可检测，1~5分钟判读结果。

爬速快，背景干净，判读线条显示清晰。

产品形式多样，人性化设计，适用于各级医疗单位和家庭自检。

常温存储，便于携带，有效期24个月。

· 产品原理 人绒毛膜促性腺激素（hcg）是受孕妇女体内胎盘产生的一种糖类蛋白激素，在受孕妇女的尿液内大量存在。秀儿早早孕检测系列产品采用层析式双抗体夹心法的原理，以胶体金为指示标志，检测尿液中hcg浓度，来确认妇女是否受孕。用于妊娠早期辅助诊断。

· 技术指标 灵敏度：可检测浓度25mIU/ml的hcg。 特异性：hLH、hFSH、hTSH等在一定浓度下均不对检测结果造成干扰。

【早早孕试纸使用方法】（每张试纸条铝箔袋上有说明）1、一次性尿杯收集尿液。2、眼包装铝袋切口部分撕开，取出试纸条。3、将试纸条标“max”一端浸入到尿液中，尿液液面请勿超过“max”标志线，约3秒钟后取出试纸条平放。4、3~5分钟内观察结果，5分钟后显示的测试结果无效。

【早早孕试纸结果判断】（每张试纸条铝箔袋上有说明及图解）阳性（怀孕）：二条红色反映线：检测区（t）及对照区（c）各出现一条红色反映线；检测区（t）颜色浅于对照区（c）颜色时，表示可能刚怀孕，请隔天用晨尿重测确定。阴性（未怀孕）：一条红色反映线：仅在对照区（c）出现一条红色反映线。无效：对照区（c）无红色反映线出现，表示测试结果错误或无效。

作用原理:当成熟女性怀孕后，胎盘细胞会大量产生一种糖蛋白,名字叫绒毛膜促性腺激素（简称hcg）。这些激素会通过孕妇的血液循环而排泄到尿中，因此检测育龄妇女受孕后尿中的hcg可以判断是否怀孕.