

大卫早早孕检测试纸验孕纸早孕纸早孕试条本店另有排卵试纸0.65

产品名称	大卫早早孕检测试纸验孕纸早孕纸早孕试条本店另有排卵试纸0.65
公司名称	深圳市美仁电子商务有限公司
价格	.00/张
规格参数	类别:大卫 规格型号:条 生产厂家:大卫
公司地址	深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋4楼F1单元（入驻深圳市中企信星电子商务有限公司）
联系电话	暂无

产品详情

敏感度高：可测尿hcg的最低浓度25iu/l

准确性高：准确率在99.9%以上。

检测原理：当成熟女性怀孕后，在胚胎发育成长为胎儿的过程中，胎盘合体滋养层细胞产生大量的绒毛膜促性腺激素（hcg）。这些激素会通过孕妇的血液循环而排泄到尿中，因此检测育龄妇女受孕后尿中的hcg可以判断是否怀孕，快速而准确。

确定检测时间：月经过期当天即可检测，或在同房后7-10天进行检测。

检测方法：收集尿液（第一次晨尿为佳），插入试纸条，5分钟内观察结果。方便、快捷、准确。

检测结果的判断：

阳性：试纸条上端和下端均有色带出现，表示怀孕。

阴性：只在试纸条上端出现一条紫红色带而下端无色带出现，表示未怀孕。

无效：无色带出现。说明试纸条已失效。

使用试纸的注意事项：

1、液面不可超过max线。

- 2、最好及时检测尿液可在室温放置8小时，冰箱放置24小时，检测时需恢复至室温，不得冻存。
- 3、遵守测试时间，5分钟内读取结果，5分钟后结果无效。
- 4、请在产品有效期内使用

【商品特性】方便、快速、准确！本品准确度高、体积轻巧、携带方便，是二十一世纪女性把握佳期的时尚选择；一天内任何时间均可检测(晨尿最佳)。1 - 5分钟读取结果，5分钟后结果无效。让你及时准确的诊断是否怀孕!

【作用机理】人绒毛膜促性腺激素（hcg）是一种糖蛋白，由胎盘产生。由于分子量较小，可通过肾小球从尿中排出，所以测定尿中的hcg是诊断妊娠的可靠指标。孕友诊断试纸采用单克隆胶体金生物技术，检测育龄妇女受孕后7-10天尿液中的hcg，判断是否怀孕。

【使用方法】取尿放入尿杯中，将试纸标有max的一端浸入尿液中（尿液面不得超过max线）。

【注意事项】试纸上端为控制线，下端为反应线；试纸反应线因标本中所含hcg浓度多少可呈现出颜色深浅变化。 **【储存方法】**于4—25摄氏度避光保存，不得冻存。