

强生腔镜关节头直线型切割吻合器EC60A、进口吻合器

产品名称	强生腔镜关节头直线型切割吻合器EC60A、进口吻合器
公司名称	潍坊卓汇商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区新华路4220号嘉汇财富花园财富大厦商住楼北附楼4-410室（注册地址）
联系电话	13651305582

产品详情

强生腔镜关节头直线型切割吻合器EC60A、进口吻合器产品说明:

产品介绍：

品牌：美国强生ETHICON

型号：EC60A

名称：吻合器

适用范围：适用于吻合术中的横切、切除和/或重建。可用于多种开放式或微创性普通外科、妇科、泌尿科、胸外科和小儿外科操作。可与吻合线或组织吻合钉支持物配合使用。还可用于横切和切除肝实质组织（肝脏血管系统和胆道结构）、胰腺、肾脏和脾脏

相关产品：

型号产品	描述	包装
------	----	----

EC45A 腔镜直线切割吻合器(340mm)

EC45A适配钉仓

ECR45W（白）张开高度：2.5mm；闭合高度：1.0mm 12枚/盒

ECR45B（蓝）张开高度：3.5mm；闭合高度：1.5mm 12枚/盒

ECR45G（绿）张开高度：4.1mm；闭合高度：2.0mm 12枚/盒

EC60A 腔镜直线切割吻合器(340mm)

EC60A适配钉仓

ECR60W（白）张开高度：2.5mm；闭合高度：1.0mm 12枚/盒

ECR60D（金）张开高度：3.8mm；闭合高度：1.8mm 12枚/盒

ECR60B（蓝）张开高度：3.5mm；闭合高度：1.5mm 12枚/盒

ECR60G（绿）张开高度：4.1mm；闭合高度：2.0mm 12枚/盒

产品说明：

卓越性能，专门为不同厚度的组织设计。

系统性组织压力，理想的吻合成钉，适用于后组织，钉砧是一体化锻造，构造坚固，其强度保证对不同厚度的组织能提供均匀一致的压力。

击发前停留的15S过程中，独特的钉砧设计使其能够对组织进行压榨，为形成一致的切割吻合线提供了更薄更平滑的吻合面。

击发时，吻合器钳口的3点间隙控制系统，可以确保击发时缝钉从近端到远端始终成型一致。

真正的单手操作，可让使用者更专注于外科视野，不受干扰。

独特的自适应关节头设计，摆脱了传统的旋转杆控制的双手操作，消除了调整角度的局限性，使医生可更准确地将钳口置于所需位置。

更大的钳口开口，组织更易于置入钳口，方便进行组织定位和操作。

设有刀片方向转换钮，可以在紧急情况下终止击发并退回刀片。

杆间距离更短，吻合器的击发杆和闭合杆之间的距离比其他内径切割吻合器更短，使用起来更舒适，更方便。

名称：强生EC60A 腔镜关节头直线型切割吻合器

品牌：强生

包装：1把/盒

EC60A 腔镜直线切割吻合器(340mm) EC60A适配钉仓

ECR60W（白）张开高度：2.5mm；闭合高度：1.0mm12枚/盒

ECR60D（金）张开高度：3.8mm；闭合高度：1.8mm12枚/盒

ECR60B（蓝）张开高度：3.5mm；闭合高度：1.5mm12枚/盒

ECR60G（绿）张开高度：4.1mm；闭合高度：2.0mm12枚/盒

6排交错成钉技术，确保缝合的安全性；

每更换一次钉仓提供一个全新刀片，保证手术切割锐度，防止交叉感染；

安全锁装置，避免已使用的钉闸二次击发，确保手术安全；

11种钉仓可供选择；

双重加压系统，闭合前压缩组织，便于止血和成钉

吻合器材质为不锈钢，吻合钉材质为钛合金，产品辐射灭菌。

产品结构及组成：

产品由吻合器组成,主要部件有关闭杆(1)、击发杆(2)、旋转钮、关节翅片、手动刀倒转开关、行程计数指示器、刀向指示器、钉砧释放钮、关闭杆和钉砧。已经辐射灭菌,一次性使用。

使用范围：

适用于吻合术中的横切、切除和/或重建。可用于多种开放式或微创性普通外科、妇科、泌尿科、胸外科和小儿外科操作。可与吻合线或组织吻合钉支持物配合使用。还可用于横切和切除肝实质组织(肝脏血管系统和胆道结构)、胰腺、肾脏和脾脏