

称因为专业 所以信赖 供应方形电子健康秤人体秤 可印LOGO

产品名称	称因为专业 所以信赖 供应方形电子健康秤人体秤 可印LOGO
公司名称	永康市三标五金制品厂
价格	21.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:新晨 型号:xc-2012a
公司地址	浙江永康市学院路18号
联系电话	86 0579 87590368 13566919135

产品详情

技术参数（随机配有中英文说明书）

最大称重量: 150kg
最小称重量: 2.5kg

2种称重单位可选：kg/lb(公斤/英磅) 自动零点跟踪

使用温度：5 ~ 40 纽扣电池

震动开机自动称重
自动关机

台面钢化玻璃：直径28mm 厚 6mm 显示方式：4位液晶（000.0）

秤体自身重量定期自动记忆（自动去皮功能） 非商

业用，家庭用于人体测量用 电子秤包装后2.5公斤,快递按照3公斤计费 自动关机
时间：10秒 低电压显示：“10” 出错显示：“———” 超重显示：“o_ld”

使用方法：

- 1) 把单位选择开关拨到左边位置：kg（此时单位是公斤，符合中国人习惯，右边位置是其他单位：st（lb）是英制的）
- 2) 用一只脚轻踩一下秤体台面，此时显示屏幕会显示移动的“0”字，约3秒种后变为显示“0.0”，再过约6秒种显示屏幕自动熄灭（如电子秤预先装有电池，则直接显示“0.0”）。此时电子秤已经自动记忆了零点位置，这是电子秤自动归零操作，以后称体重就准确了。另外电子秤有离称自动归零功能，当您测量后走下电子称体，过几秒钟显示屏自动关闭，并同时进行了归零操作（所以有时候您测量时第一次有可能不准，但第二次开始就准确了）。在移动电子称时，要等它显示关闭以后再进行。电子秤每天会自动记忆零点位置一次，所以要求平时电子称要平放在坚硬平坦的地面上，上面不要摆放任何东西。
- 3) 等显示0.0您就可以直接站上去称重了。
- 4) 在称重过程中，显示屏重量读数在增加，直到重量读数稳定并闪烁被确定为止。这时的读数就是您的体重。

使用过程中的注意事项：

- 1、称必须放在比较平的地面上；
- 2、不能放到如地毯等比较软的地面；
- 3、将称的称重单位选到kg，lb是英制的英磅，一英磅等于0.453592kg；
- 4、开机后如标识不是显示0.0，就必须等6秒钟左右自动关机后再开机就会清零。比如显示1.8kg，这是机器在秤玻璃面板的重量，再自动去皮，所以这时候不能测，测也是个错误数据，必须等到先自动关机，再用脚轻碰秤，这时秤再开机，并显示0.0kg，这时就可以测了。
- 5、如果您感觉秤与实际体重相差较大，请检查您选择的单位是kg还是lb，kg是公斤，lb是英磅

我们厂是一家专业生产各种电子人体称,电子厨房称的厂家,产品质量保证,价格优惠!欢迎海内外客户来人

来电洽谈业务!

6mm钢化玻璃台面,高精度传感器,只要站上去就会显示称量,产品轻巧美观,可制作任何您喜欢的精美图案。

称量范围：2.5-180kg分度值：0.1kg/0.2lb显示方式：4位液晶显示电源：3v cr2032锂电池工作温度：10-35摄氏度开机方式：自动上秤称量单位：kg/lb自动关机：10秒低电压提示：“lo”出错显示：“ ” 超重显示:"err"包装尺寸:56*32.5*31.5cm/10pcs毛净重16/15kg

操作说明：

1 初始使用，请将称“off”开关拨动到你所需的kg或lb位置;以后脚振动玻璃，即可自动开机。

2 本称首次着地开机会显示称体重量（2公斤左右），开机后出现开机画面8888，待其显示为“0.0”后即可称重;

3 将称放在平整的地面上，称体四角位置不平会影响称重的准确度;

4 人稳定站在称面中间，开始称重，称重值稳定后，显示闪烁，锁定称重量值;

如无称量变化，10秒钟后自动关机;

5 若开机后显示：“lo-”,表示电池已低效，应更换电池（3v-cr2032锂电池）;

6 称量显示“——”表示称量出错，待开机后重新开始;

7 称量显示：“0-ld”表示称量超重，待开机后重新开始;

8 保持干燥，勿碰水;

9 不使用时不要在称面上堆压物品，以免电池大量消耗无法正常工作;

10 人在称上应平稳站立，以免无法锁定，显示不正确;

11 不能用力重击称体，以免损坏传感器

针对买家常见问题回答:

1.你家的称易坏吗?

答:产品是钢化玻璃做的,不人为损坏的话,一个称用过10年没问题.

2.称精准度多少,起重多少,承重多少,子用完了怎么办?

答:精准到0.1kg;起重5kg;最大承重180kg.电子用完了，可在当地的商店随处买到。

3.称出的重量比我平时重了10多斤?

答:称后有一个开关,居中是关,左右都可以开,但一边显示的是英磅(lb),另一边显示是千克(kg),如果亲不注意、开关开到了英磅那边,而误当成千克算,就会比平时重10多斤了.所以称上要显示"00kg",才可以秤.

4.怎么我前后称出的重量会不一样,是不是不灵敏?

答:称是靠4个脚上的感应器感应检测重量的,如果你站立不平稳,以至称无法锁定,显示不正确.(你可以放物品在称上多次称,多次显示重量都一样,那称就是没有问题的了,因为物品你放好了不存在不平稳的情况.),所以建意亲们称体重时每次尽量居中平稳站立,以便得到更精准体重数据.

5.这个称每次开机都要踩好几下敲好几下才有显示,还不显示00kg?

答:敲一下要等2秒左右才会有显示的,接着敲几下反而有会延迟显示哦;称刚开机时,是不会直接显示00的,显示1.5、1.8,1.9等的情况都有,别急,显示过2秒后会自己消失,消失后再敲一下称就可以显示00kg了,这时就可以用称了.

6.这个称能用多久啊?

答:本商品本身出厂带一颗电子的,一般可以使用8个月到1年左右,很过顾客又疑问那用完之后怎么办啊?本店承诺,以后客户如遇电子用完,可只支付邮费,本店免费赠送电子。打消您的后顾之忧,买的更省心。

"称【因为专业 所以信赖】供应方形电子健康秤人体秤 可印LOGO"的称量范围为150KG,型号是XK2011 A,供电方式为CR2032电池,品牌是新晨,显示方式为数字,加工定制是是,外形尺寸为28*28CM