

49元/盒博士伦润明除蛋白120ml*3

产品名称	49元/盒博士伦润明除蛋白120ml*3
公司名称	上海爱镜电子商务有限公司
价格	49.00/副
规格参数	
公司地址	上海市松江区徐塘路88号1幢4层413室
联系电话	13828084818

产品详情

润明除蛋白，清新镜片每一天！博士伦轻巧装时刻关照你佩戴感受，清洁镜片、舒缓眼睛干涩不适；随身带、办公室、家中关怀处处体现。全天的舒适佩戴，来自全面的镜片护理，润明除蛋白全护理液复合hdp专利三效分子，一次完成清洁除蛋白，杀菌，湿润全面护理，令镜片真正持久舒适，更有免揉搓功能，令使用更方便。全面护理镜片，确保全天佩戴舒适。h分子---去处蛋白：独特地去除每日蛋白积聚，抑制蛋白沉淀。d分子---清毒杀菌：有效杀灭细菌和微生物，对金葡球菌、绿脓、大肠杆菌杀菌率达99.9%。p分子---清洁保湿：去除油脂和尘垢保持镜片湿润。

【使用说明】

1. 操作前请先用流动的水彻底洗净双手，洗过的手不得再随意触摸其他物品，以免污染镜片。
2. 戴用前需用新鲜的隐形眼镜护理液冲洗镜片的正反面，确认镜片表面干净后再戴入眼内。
3. 摘取镜片时用拇指和食指轻捏镜片从眼睛中取出。
4. 可滴数滴新鲜隐形眼镜护理液于掌心，用指腹适当揉搓镜片清洁效果更佳。
5. 请垂直倾倒新鲜的隐形眼镜护理液彻底冲洗镜片的正反面。
6. 将清洁过的镜片区别左右眼分别置于干净的镜盒中，垂直倒入新鲜的隐形眼镜护理液（以2/3为宜）。
7. 使镜片完全浸没在隐形眼镜护理液中，盖紧盒盖，浸泡4小时以上或过夜即可重新配戴。

【注意事项】

注意事项：1.认真仔细阅读护理液盒内所附的说明书2.护理镜片前，必须用中性清洁剂彻底清洁双手3.必须严格按照护理程序护理镜片4.请勿重复使用用过的护理液5.请在室温下储存，并避免儿童接触6.不使用护理液时，请保持瓶盖紧闭，勿将瓶口触及任何物品，避免污染7.请于包装所示有效期前使用，并在开瓶后120天内使用，以保持护理液的有效性8.本品不适宜加热使用9.请勿与其他护理液或眼药混合使用10.若您对任何成分过敏，请勿使用本品。

产品特点：1、能呵护各种品牌的软性隐形眼镜。2、集免揉搓、除蛋白、清洁、冲洗、消毒、储存及保湿功能于一体。3、其独特的复合除蛋白清洁配方，有效清除附着于镜片表面的蛋白质沉积物。4、按规定程序护理后的镜片，如同每天更换新的镜片一样，让您享受清晰舒适的视觉。

注意事项：1、认真仔细阅读护理液盒内所附的说明书。2、每次按规定的保养程序清洁消毒镜片。3、取戴镜片前要先洗净双手，请不要用任何物品与保养液瓶口接触，用后请盖紧瓶盖。4、用过的保养液必须弃去，不可重复使用。5、保养液开瓶后，请在三个月内用完，以免影响效果。6、请在标示的有效期内使用。7、保养液应室温避光保存，不得高温消毒。8、请勿分装于其它小瓶中使用。9、眼睛如有任何不适，应停止配戴镜片，并立即咨询眼科医生或验配师。10、置本品于儿童无法触及处。11、每三个月更换新的镜盒。

挑选护理液7个要点隐形眼镜护理液对于配戴隐形眼镜的人来说，无疑是必不可少的。在进行选购时，务必要查看产品标签说明书上标注的以下内容：1) . 产品名称；2) . 规格、剂型；3) . 生产企业；4) . 生产企业卫生许可证号；5) . 使用方法和使用范围；6) . 注意事项；7) . 生产日期和保质期。注意：不要一次购买多瓶护理液。家中的环境与专业销售部门的保存环境有差异，不能为护理液提供合适的环境。) 目前市售的隐形眼镜护理液按类别可分为不具有消毒功能和具有消毒功能两类，按功能可分为单一型与多功能型，包括清洁、消毒、冲洗、保存四个步骤，只具有其中一种功能的称为单一功能型，同时具有四种功能称为多功能型，其中消毒环节是保证隐形眼镜镜片卫生的关键步骤。(2) 因此，消费者要根据自己的需求合理选购相应的产品，不要将没有消毒功能的单一功能型产品当作多功能型产品使用，否则不但起不到保护镜片的作用，还会造成镜片污染、导致眼部感染，严重的会造成失明。护理液的成分到底是什么？这些成分具有哪些护理功能？不同隐形眼镜护理液的成分会略有不同，以多功能护理液来讲，成分主要包含：(1) 可以安全有效地对隐形眼镜进行消毒和清洁的成分，这一成分在对隐形眼镜消毒和清洁的同时尽量把对眼部造成的刺激降到最低；(2) 两种湿润剂，它们的成分和眼泪接近(这种湿润剂也被用于治疗干眼症的产品中)，该成分可以在眼球上形成一层湿润的保护膜，提高佩戴隐形眼镜的舒适度，并且能长久保持眼球和隐形眼镜之间的润滑；(3) 4种生理电解溶液和牛磺酸，使隐形眼镜护理液与人体泪水的生理环境更加匹配，这样可以保证佩戴隐形眼镜的健康和舒适度。对于选择隐形眼镜护理液，目前很多眼科医生推荐使用含有牛磺酸配方的护理液，因为牛磺酸存在于眼睛的细胞组织、泪液和其他身体组织(包括骨骼、心脏和大脑)中，具有抗氧化功能，可确保角膜组织的正常生长，并能有效渗透细胞表面，起到加强修护细胞的作用。通过抑制人体泪液中有益的蛋白质溶菌酶氧化及变性，并调节上皮细胞的水分含量，减少蛋白变性的发生，起到维持眼睛“生态平衡”的作用，从而有效降低隐形眼镜配戴者眼睛瘙痒，甚至眼睛刺痛情况的发生。如何使用护理液1)、消费者仔细阅读使用说明。2)、要注意用眼卫生和个人清洁卫生。3)、使用后，产品的保存也不应忽视，不要将护理液放在潮湿的浴室或者阳光直射的地方，否则容易导致变质、发霉。4)、消费者要树立一个观念：隐形眼镜护理液是用来护理镜片而不是护理眼睛的。5)、如果发现眼睛红、痛、视力模糊，使用者应该停止使用并寻求医生的指导

"【49元/盒】博士伦润明除蛋白120ml*3"的类型为护理液，型号是博士伦润明，规格为120*3，品牌是博士伦，材质为见包装