

康乃格早孕检测试纸（卡）3分钟快速验孕卡

产品名称	康乃格早孕检测试纸（卡）3分钟快速验孕卡
公司名称	深圳市康乃格生物技术有限公司
价格	600.00/件
规格参数	产品名称:早早孕检测试纸（卡） 外观性状:试盒 规格:1支/盒500盒/件
公司地址	中国 广东 深圳市 公明上村莲塘美宝工业区25栋
联系电话	86 0755 83897533 15817441852

产品详情

【产品名称】通用名称：人绒毛膜促性腺激素（hcg）胶体金快速检测试纸商品名称：早早孕检测试纸英文名称：hcg

【包装规格】试纸条：1条/袋；25条/筒；50条/筒；100条/盒； 试纸卡：1人份/盒；25人份/盒；试纸笔：1人份/袋；2人份/袋

【预期用途】 适用于妊娠早期的辅助诊断,怀孕两天即可检测。

【原理及技术指标】

本检测试纸应用免疫层析双抗体夹心法原理，制成hcg快速检测试纸，可在3分钟内测定尿液标本中的hcg。检测时，当被检尿样虹吸通过胶体金标记抗体时，形成抗原抗体胶体金复合物，复合物继续爬行，通过包被的抗-hcg 亚基 mcab 时，形成双抗体夹心胶体金复合物，在包被条带处呈现色带，过量的胶体金抗体继续爬行，和羊抗鼠对照线形成胶体金免疫复合物，呈现色带。本产品的灵敏度为20miu/ml。

【检验方法】试纸条：1.

取用尿杯，留取尿样。取出检测试纸条； 2.

把试纸条有max标志的一端插入尿杯中（插入深度不得超过max标志线）10秒后，取出平放；试纸卡：1.

用尿杯留取尿样。取出试纸卡，平放； 2.

用吸管吸取尿液标本，逐滴（3-4滴）加入试纸卡的加样孔内；试纸笔：1.

取出检测笔，拔开封盖。小便时让尿液淋在测试笔吸尿口上3-5秒钟（注意不要让尿液超过箭头，以免弄湿显示窗口） 2.

套上封盖，继续平握或平放试笔；3分钟后观察结果，10分钟后判定无效。

【结果判定】1. 阳性：检测线（t线）和对照线（c线）均显色，出现两条色带，为阳性，表示已怀孕。2. 阴性：检测线不显色，对照线显色，仅出现一条色带，为阴性，表示没有怀孕。3. 无效：对照线不出现色带，测试无效，说明试纸失效或实验失败，须重新测试。

【注意事项】1.

本品为一次性体外诊断试剂，尿杯及试纸不可重复使用。2.

冰箱中冷藏保存的试纸使用前应平衡至室温。3. 谨防试纸受潮且使用前不要触摸反应膜。4.

任何时段的新鲜尿样均可作为测试尿样，但推荐使用晨尿。5.

3-10分钟内判断检测结果，10分钟后检测卡颜色的变化，不作为判断的依据。6.

首次检测阴性时，建议48小时后用晨尿复测。7. 当hcg浓度超过50000mlu/ml（怀孕2-3个月）时可能发生钩状效应，检测线可能会显阴性，应当稀释后再测。8. 子宫肿瘤、葡萄胎、习惯性流产、先兆性流产、宫外孕或更年期病人，因尿液中hcg含量过高，可能会出现阳性结果。hcg呈阳性时，建议请医生触诊或采取b超检查确诊。9. 怀疑异位、异常妊娠时，应结合其他方法进行诊断。10. 开封后请立即使用。

【储存条件及有

效期】1. 本试纸保存在4 -25 干燥阴凉处，不能冻存。2. 本试纸有效期为24个月。开封后，保质期为一天。

【生产企业】深圳市康乃格生物技术有限公司注

册地址/生产地址：深圳市光明新区公明办事处上村社区莲塘工业城美宝工业区25栋二楼邮政编码：51810

6 电话（tel）：0755-83897533，83309391 传真（fax）：0755-83309391 网址：<http://www.gldbitech.com>

【医疗器械生产企业许可证编号】粤食药监械生产许

20041057号**【产品注册证书编号】**粤食药监械（准）字 2010

第2400185号**【产品标准编号】** yzb/粤0060-2010

"供应康乃格早孕检测试纸（卡）3分钟快速验孕卡"的规格为1支/盒500盒/件，保质期是24（月），质量标准为胶体金，主要用途是适用于妊娠早期的辅助检怀孕两天检测，产品名称为早早孕检测试纸（卡），外观性状是试盒