

暖宝宝 发热贴 13*10CM

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 暖宝宝 发热贴 13*10CM |
| 公司名称 | 南充市诺信商贸有限公司 |
| 价格 | 1.00/片 |
| 规格参数 | 品牌:袋鼠暖纯贝贝熊考拉维尼小熊 产品成分:铁、石、活性炭、无机盐、水等合 产品尺寸:13*10CM |
| 公司地址 | 中国 四川 南充市高坪区 沁园路东方逸景92 |
| 联系电话 | 86 0817 15228160518 15228160518 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------------|------|-----------------|
| 品牌 | 袋鼠 暖纯 贝贝熊 考拉 维尼小熊 | 产品成分 | 铁、石、活性炭、无机盐、水等合 |
| 产品尺寸 | 13*10CM | 包装规格 | 13*10CM |
| 最高温度 | 53~63 | 平均温度 | 45~53 |
| 保温时间 | 10个时 | 保质期 | 12个月 |
| 箱装数量 | = | 贸易属性 | = |
| 产品类别 | 保暖贴 | | |

该产品为片状贴剂，是由原料层、明胶层、无纺布袋三部分组成的，原料层置于无纺布袋内，明胶层用于使一贴热粘附在衣服上。原料层是由铁、石、活性炭、无机盐、水等合成的聚合物，可在空气中氧气的作用下发生放热反应。无纺布袋的特点是均匀不漏、透气性好。明胶层选用日本特有的优质压敏胶涂层，粘结牢固，绝不污损衣物。

日本进口 非常漂亮,背胶没有残留，粘性十足.本品为最新一代高科技产品，是各种类型的畏寒病症患者理想的热敷、止痛、消肿贴剂。产品薄如纸、轻如棉、柔软而富有弹性。使用时只须往病痛的相应部位一贴，立刻就能缓解并在半小时左右消除疼痛。产品发热温度最高强63，平均48。持续时间在10小时以上，是关节炎、肩周炎、腰腿痛、风湿及类风湿、畏寒不适、四肢发凉、伤处遇寒疼痛等患者止痛保健和冬季保暖的理想用品。

本产品有袋鼠暖纯 贝贝熊 考拉 维尼小熊五系列在没有说明的情况下 一律随机发货 谢谢您的惠顾！

作用原理：1、一贴热中的原料层可以在空气中氧气的作用下10小时以上持续不断地释放热量，这种反应过程是从一打开真空包装的时候开始的。2、人体各部份都存在局部的微循环系统，为人体各部份输送营养，排出体内垃圾。中医理论强调通则不痛，痛则不通，意即当人体经常受寒气侵袭，局部的微循环系统发生阻滞时，使相应机体既得不到营养，又无法排出废物，就会产生痛疼，进而引起病变。而一贴热的持续放热可以促进人体微循环进入良性循环状态，恢复正常的生理机能，从而消除疼痛，治疗疾病。作用功能：1、快速缓解并消除各种畏寒疾病引起的疼痛，是关节炎、肩周炎、腰腿痛、风湿及类风湿、四

肢发凉、患处遇寒疼痛等疾病患者迅速止痛的即开即用型产品。

2、驱寒保暖，促进人体微循环，对手、脚冻伤、骨伤、肌肉损伤等症状具有良好的消肿止痛功能。3、促进经络畅通，热敷相关穴位，消除胃寒不适、经血不通等症状，具有活血化瘀的作用。4、冬季替代厚重的棉衣，为人体提供温度保障。使用方法：将一贴热的真空包装沿切入口打开，揭去一贴热后面的衬纸，贴于内衣的外侧，用手铺平即可。可贴于人体的肩部、背部、腰部、胃部及相关关节部位。适用范围：1、用于风湿、关节炎、痤疮、劳损引起的疼痛、麻木、肿胀。

2、用于受寒引起的胃肠病、腹泻、腹痛等。3、妇女痛经、产后收腹。4、外伤恢复期理血散瘀。

5、滑雪、钓鱼、打猎、郊游、野外作业时取暖。6、房间内低温时取暖。

7、按摩的热敷等。注意事项：1、使用时要贴于内衣的外侧，不要直接贴于人体皮肤上。

2、请注意低温烫伤，就寝时请不要使用。

3、糖尿病和血液循环障碍者，皮肤热敏感度低者，请在使用时注意。

4、小孩，高龄者，不能自理者应在特别看护下使用。5、若不慎接触到眼睛要立即用清水冲洗并就医。

误食后要立即催吐并就医。保存方法：产品置于干燥、避光处保存。放在幼儿不易拿到的地方。提示：日本全进口的东西，外观，包装没的挑剔的，各个细节都拿捏的不错，惟独就是背胶有点过，内衣挑厚实点的贴就没问题。七、关于一贴热问答：1、问一贴热为什么能治疗关节炎与畏寒症，原理是什么？答：关节炎、颈椎痛、肩周炎等关节炎疾病从病理原因上讲都是局部微循环阻滞的结果。而一贴热的主要功能就是促进人体局部微循环系统运转正常，从而消除各种微循环阻滞给人体带来的危害，达到治愈的目的。

2、问：一贴热在什么季节使用？答：一贴热的效果不受季节影响。相对来讲，冬天的需要量要多于其他季节。3、

一贴热的主要特点是什么？答：可以12字来概括：随身携带，一贴即热，立刻见效。4、问：我经常四肢发凉，如何使用一贴热？答：若是四肢发凉的话，可在双肩部分、双膝部位同时使用一贴热，坚持30天，即可收到治愈效果。5、我在冬天的时候，怎样用一贴热保暖？答：你可以用“鞋用一贴热”，坚持使用一个即可。6、问：我在冬天把一贴热在贴身的内裤内侧上，为什么有时候感觉不到热？答：一贴热的质量完全可靠，不存在不热的情况。像你所说的情况可能是把一贴热贴在内裤内侧，若内裤及外面的衣服封闭很严的话，由于得不到氧气作用而使反应停止了，所以感觉不到热。你只须把一贴热贴在内裤外侧即可。7、问：冬天穿裙子的时候，怎样用一贴热保暖？答：可在小腹部或后腰部贴一到两贴。若是穿上裙子，可在双膝各贴一贴即可。8、问：每天什么时候用一贴热最好？答：可在每天早晨起床时贴上新，撕下旧的，如此反复即可。9、问：我冬天出差的时候能光带一贴热而不带别的衣服吗？答：完全可以。在日本及欧美各国，他们就是这样做的。10、问：我的孩子冬天上学可以用一贴热保暖吗？答：当然可以。我们国家大多数教室都缺乏保暖设施，孩子在里边确实是够冷的，用一贴热给孩子保暖绝对是个好办法。每天一贴，孩子身暖，父母心安。现在天气越来越冷了，这个除了自己用还可以送父母、送孩子、送姐妹、送兄弟、送同事.....男女老少都适宜，很划算的哦！！1.女孩子来月经痛经的时候，贴一片在小腹上，片刻一股暖流从丹田流向全身，痛经立即有效缓解，而且温暖一整天哦（月经时怕寒），很灵的说~2.寒冷的冬季里，gg可以送给心爱的mm们，这样mm的这个冬天就不冷了，圣诞元旦等节日逛街的时候放一片在口袋里，从手心暖到心田，没有你牵的一只手也同样温暖如春，mm肯定会因为你的细致关怀而感动不已！！3.有小孩上学的也可以用哦，贴在膝盖上或者放在口袋里，上课再也不会因为冷而不能集中精力听课了！！4.家里有老年人的也可以用的，冬天老年人最怕冷，孝顺的你买一些送给老年人，老人肯定喜欢而且觉得贴心实用，贴在腰上或者膝盖上再也不会觉得冷！！其实这个对老年人来说是四季常备用品的说！！5.经常骑车的人也可以用的，冬天寒风很大，骑车的时候贴一片在膝盖上，不仅保暖而且有效预防风湿减轻疼痛！！6.马上就要过年了，打牌娱乐的时候贴一片，有效驱寒，令你火气旺上加旺，红红火火过新年呀~7.喜欢钓鱼等户外活动的朋友们，也可以贴在身

上保暖驱寒的，嘿嘿~8.家里有准备考研的人的话，现在用正好哦，12月冲刺的时间不要让寒冷的天气影响了复习的心情和效果哦，贴上一片一整天都是暖暖的，复习的效率可是100%哦~9.结婚的新娘子，冬天里贴上一片真是就有结婚的风光喜庆，又保持身体暖暖的，有活力而且还不会感冒哦，很灵的说~