

# 乐音无线 耳背式助听器,助听器

产品名称	乐音无线 耳背式助听器,助听器
公司名称	诸暨市康好助听器经营部
价格	40.00/个
规格参数	
公司地址	诸暨市店口镇华东汽配水暖城71幢1568—1号
联系电话	86 0575 87628517 13106319787

## 产品详情

乐音无线 耳背式助听 通用乐音ha-318b是厂家为国内广大消费者最新设计制作的一款高级耳背式助听器.其功率大.噪音更小.音质更清晰.失真度更低.能广泛满足不同程度听力损失的人士的需要。 乐音ha-318b工作时噪音低.耗电省.放大后的声音清晰.明亮.清脆.机内电路设计能提升对人声的灵敏度.抑制环境的杂音噪声.使得听到的声音更加清晰.同时该机的声音定位基本不变.使得使用者倍感舒服、逼真。 本产品体积轻巧.声音清晰.音量大小可调.适用于各类听力损失人群。 本产品通过了医药器械生产审查.质量可靠.安全使用有完全保障。

如何鉴定听损，请看下表听力损失程度.

- 1.树叶沙沙声，鸟叫声（10分贝）
- 2.流水声（10-20分贝）
- 3.悄悄话（在耳边、15-25分贝）
- 4.手表嘀嗒声（30-40分贝）
- 5.普通说话声（40-60分贝）
- 6.大声说话声（距离1-2m、70-80分贝）
- 7.大声说话声（在耳边、80-100分贝）

8.狗叫声（60-80分贝、低频音）

9.电话铃声（80-90分贝、高频音）

10.鞭炮声（100-120分贝）

本产品适用于6.7.8.9.10种情况的中重度到重度,极重度听障人士.经济简约.

标签.标识说明：n---助听器电源开关的"开"档o---助听器电源开关的"关"档“+”---电池正极；“-”---电池负极“1、2、3、4”----音量的大小，“1”最小，“4”最大。使用说明：1、电池安装：请轻轻打开电池仓盖，将一粒pr44电池按正负极方向放入电池仓，再把电池仓关闭。2、把耳钩挂在耳背上，然后将耳塞塞入耳内并尽量塞紧，将n-o开关拨到“n”档，再调节音量旋钮到最清晰声音即可。3、不用时，把n-o开关拨到“o”档。

使用产品注意事项：

\* 如果听到啸叫声 请检查耳塞（硅胶）的大小是否合适，是否塞紧，选用合适耳塞并塞紧，不要漏气。\* 长时间不使用，请把电池取出，以免电池腐烂侵蚀助听器部件。\* 请定期清洁耳塞或耳模以保证助听器的正常使用。\* 防震、防摔、防潮、防高温

产品的维护和保养：不用时，把“on-off”开关拨到“off”档使用干布或助听器专用清洁剂喷在干布上清洁助听器外壳。助听器不响的原因：\* 开关是否打开；\* 电池是否按正确的方法安装；\*

电池是否有电；\* 电池仓是否关闭；\* 耳塞是否被杂物堵塞；\* 耳机是否已坏；\*

导线是否已断；助听器声音微弱或模糊：\* 电池的电压不足；\* 耳机故障； 电池寿命太短的原因：\* 不用时电池仍在助听器内，而且开关不在“o”档；\*

电池开包装后与金属物品放在一起或长期暴露在空气中。

储存方法1、在相对湿度不超过80%，无腐蚀性气体，干燥通风处存放。2、在长期不使用时，切勿忘记将电池从电池仓中取出，并将声音放大器在相对湿度不超过80%，无腐蚀性气体,干燥通风处存。

包装类似，送电池因产品不同，型号与品牌会不同，随机送，保证可以用。

"乐音无线 耳背式助听器,助听器"的品牌为乐音，材质是IC