

手术室加温柜 医用等渗盐水注射液加温柜

产品名称	手术室加温柜 医用等渗盐水注射液加温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	71084.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室加温柜 医用等渗盐水注射液加温柜产品用途-

研究表明，术中使用加温药液，可增加病人舒适度,减少了寒战的发生率,对手术室护理有重要意义。福意联手术室恒温箱加温恒温保存相关液体药品，有传感器报警、高低温报警等多重安全防护措施，对于术中综合保温措施有着不可忽视的作用。用于手术冲洗液、甘露醇、医用盐水、B液、造影剂加温等。

手术室加温柜 医用等渗盐水注射液加温柜用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，tigao手术护理质量。

手术室加温柜 医用等渗盐水注射液加温柜产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

手术室加温柜 医用等渗盐水注射液加温柜相关-凝血物质的活性降低，抑制凝血功能，增加手术-量3.深静脉血栓形成。 5、内分泌系统：抑制药品分泌，甲状腺素和促甲状腺素分泌增加，肾上腺素、多巴胺等儿茶酚胺水平随低温而增加，中易发生高血糖。

6、改变药物代谢周期：增加肌肉松弛药的作用时间，延长后苏醒时间。

7、对于创伤患者，低体温与死亡发生率的升高相关。

8、其他：低体温可使肾血liuliang下降，ph升高以及呼吸减慢等。 四、预防措施

1、设定适宜的环境温度：应维持在21-25度。根据手术不同时段及时调节温度。

2、注意覆盖，尽可能减少皮肤暴露。 3、使用加温设备，可采用充气式加温仪等加温设备。

4、用于静脉输注及体腔冲洗的液体宜给予加温至37度。 5、高危患者（婴儿、新生儿、严重创伤、大面积烧伤患者等）除采取上述保温措施外还需要额外预防措施防止计划外低体温，如可在手术开始前适当调高室温，设定个性化的室温。 五、注意事项 1、应采用综合保温措施。

2、在使用加温冲洗液前需再次确认温度。

3、应使用安全的加温设备，并按照经营商的书面说明书进行操作，尽量减少对患者造成可能的损伤。

4、装有加温后液体的静脉输液袋或灌洗瓶不应用于患者皮肤取暖。 5、使用加温毯时，软管末端空气温度极高，容易造成患者热损伤。不能在有加温毯的情况下直接加温或使用中的软管与加温毯分离。

6、加温后的静脉输液袋或灌洗瓶的保存时间应遵循静脉输液原则及产品使用说明。 7、对使用电外科设备需要粘贴负极板时，应注意观察负极板部温度，防止负极板部过热性状改变对患者皮肤造成影响。 8、使用加温设备需做好病情观察及交接班工作。

9、加强护士培训，掌握预防低体温及加温设备使用的相关知识。 六、总结 1.

tigao护理售后意识，重视对“低体温”的主动预防。 2. 规范围术期的护理，

病人的保暖工作，应从入手术室前做起。? 3. 加强对病人围术期的心理疏导和术中体温监测。 4.

加强业培训，默契配合，尽量缩短、手术、创面暴露时间。 5.

选择适应的加温设备，tigao病人手术舒适度，确保病人术中的安全 6. 单一的保温方法不一定能起到保温作用。术中采用复合保温护理方法可有效地维持病人的正常体温。 手术室加温柜

医用等渗盐水注射液加温柜