

医用液体恒温箱FYL-YS-430L手术室用加热箱

产品名称	医用液体恒温箱FYL-YS-430L手术室用加热箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74467.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用液体恒温箱FYL-YS-430L手术室用加热箱产品用途-

面对日趋完善的医疗体制，福意联为您倾情打造更好售后的产品。是门针对手术室而设计，将所需输注液、冲洗液加温到人体能够接受的温度，很好的降低了低温对病人的刺激，提升医疗单位售后质量！本产品可加温瓶装或袋装液体，加温医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等相关液体，深化手术室护理质量。

医用液体恒温箱FYL-YS-430L手术室用加热箱用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

医用液体恒温箱FYL-YS-430L手术室用加热箱产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用液体恒温箱FYL-YS-430L手术室用加热箱相关-加温液体和脑科手术粘帖巾联合运用在胆道镜辅助取石术中预防术中低体温的效果。方法选择胆结石手术患者54例,观察组27例,在手术过程中的静脉输入液体及术区冲洗液预加温至37℃,用脑科手术粘帖巾粘贴于术区进行保温;对照组27例,静脉输入液体及术区冲洗液均为室温,用普通手术粘帖巾粘贴于术区,比较两组患者手术情况,评价加温液体和脑科手术粘帖巾联合运用的临床效果。结果观察组患者体温在术中1 h、术中2 h、术毕、术后10 min时更接近正常,而心率更,血压及血糖更高,与对照组相比有差异(P<0.05);同时观察组患者术中失血量少、术后苏醒时间短及寒战发生率,与对照组比较差异有高度统计学意义(P<0.01)。结论胆道镜辅助取石的患者术中加温液体和脑科手术粘帖巾的应用,尽可能地避免术中体温下降所致相关并发症的发生,减少术中体温下降对患者的不良影响,促进手术患者安全顺利渡过手术恢复期。医用液体恒温箱FYL-YS-430L手术室用加热箱