

GE彩超腹部探头C1-6-D冰晶凸振探头晶体振元声透镜胶皮置换维修

产品名称	GE彩超腹部探头C1-6-D冰晶凸振探头晶体振元声透镜胶皮置换维修
公司名称	广州锦鸿医疗科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	GE:C1-6-D
公司地址	广州市白云区永平街东平北路129号401-C343室
联系电话	15113812655

产品详情

适用机型：GE Logiq E9/S8 Vivid E95/E90/E9 探头的保养与维护（1）超声探头是贵重器件，在使用过程中必须小心轻放，不得碰撞声头，在运输、保管过程中应使用原厂家的探头包装盒或用软布包好声头。（2）在安装和拆下探头时应首先关闭整机主电源，然后小心地进行操作。（3）要避免接触有机溶剂，否则探头会因接触有机溶剂开裂损坏，但可用酒精类的有机溶剂。切记不能用丙酮类擦拭。（4）保护透镜面。透镜面一旦损坏，耦合剂就容易进入探头内部，损坏压电晶片，因此使用中不允许用锋利物品刺透镜面。（5）应使用无腐蚀性的耦合剂，使用的超声耦合剂对皮肤无刺激作用，非油性，因为不少探头的声透镜容易受到油性物的腐蚀而损坏。