

急救训练模拟人 心肺复苏模拟人 急救模拟人

产品名称	急救训练模拟人 心肺复苏模拟人 急救模拟人
公司名称	北京宏大凯盛商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:DF-2 产地:北京 颜色:绿色
公司地址	北京市丰台区方庄南路15号楼方恒偶寓2A座1216
联系电话	01081535399 13264238508

产品详情

急救训练模拟人 心肺复苏模拟人 急救模拟人

急救训练模拟人 心肺复苏模拟人 急救模拟人

心肺复苏模拟人功能介绍：

液晶彩显:人工呼吸与胸外按压、模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示.

模拟标准气道开放；

人工手位胸外按压时：

1、动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域)
由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）由条码黄色、按压深度过深

大于6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度。

2、液晶计数显示；详细记录按压错误的具体原因（按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数）。

3、语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。

人工口对口呼吸(吹气)时：

1、动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml~600ml-1000ml）由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄

色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度；

2、液晶计数显示：详细记录吹气错误的各种原因（按吹气量过大、吹气力量过小、及吹气正确的次数）

3、语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的各种原因，以便训练者及时改正。

按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）

操作周期：有效30次按压及2次人工吹气，30：2五个循环周期CPR操作。

操作频率：2015标准为至少100次/分，也可自行设定数值

操作方式：训练操作；考核操作(普及考核、自定义考核)。

操作时间：以秒为单位计时。

语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。

成绩打印：操作结果可热敏打印长条和短条成绩单

检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。

检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。

心肺复苏模拟人材料特点：

面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、

肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

心肺复苏模拟人标准套配置：

复苏全身人体模型一具；

电脑液晶显示器一台；

手拉推式人体硬塑箱一只；

复苏操作垫一条；

屏障面膜(50张/盒)一盒；

可换肺囊装置四套；

可换面皮一只；

热敏打印纸二卷

操作指南光盘1盘

现场急救常用技术使用手册 1 本

使用说明书一本。

保修卡、合格证；

