

# APRESYS,AP2020,呼吸式酒精检测仪

产品名称	APRESYS,AP2020,呼吸式酒精检测仪
公司名称	上海睿勤电子有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:apresys 型号:ap2020 类型:呼吸式酒精检测仪
公司地址	中国 上海 上海市黄浦区 上海市广西北路528号安基大厦1606室
联系电话	86-021-61367204 13524208539

## 产品详情

ap2020呼吸式酒精检测仪
<p>ap2020酒精检测仪是美国apresys生产的呼吸式酒精检测仪，嘴巴含住吹管，把气吹入管中即可，具有高可靠、高精度、使用方便等特点，它采用了新型的气体检测技术，可以更准确探测气体的酒精含量，led数字显示使得检测直观、有效。独特的探头可有效地区分烟味、可乐、咖啡等非酒精气体的干扰。是便携应用的理想产品。</p>
<p>技术指标和特点1.检测范围：0.00-4.00 mg/ml bac（血液酒精浓度）2.传感器：高选择性半导体氧化物传感器，3000次以上测试寿命3.显示：双彩色液晶背光lcd, 3位数字显示3.热机时间：20秒4.响应时间：3~5秒5.恢复时间：30秒,用于传感器净化6.吹气检测：吹气时间不足或中间停顿，报警提示；不吹气，则自动关机7.校准检验：用户可自行检验测量准确度，仪器提示是否需要重新校准8.精度：<math>\pm 0.10</math> mg/ml（在1.00mg/ml bac时）9.校准：模拟器的血液酒精浓度(bac)10.工作温度：<math>+10 \sim +40</math> 11.存放温度：<math>0 \sim +50</math> 12.尺寸：5.6 x 12.3 x 2.3 cm / 2.2 x 4.8 x 0.9 inch13.重量：111g（含电池）14.电池：9v碱性电池，300次以上测试15外壳：防震，塑压外壳16.标准配置：主机, 9v电池, 汽车点烟器dc适配器, 3个吹口, 携带包17.选购附件：吹口 注意事项：1.若吸烟、喝酒、吃饭后测量，建议间隔20分钟后进行测量。2.避免在强风或者受污染严重的环境下使用。3.当“batt”符号在显示器上显示时，请更换电池。尽量为碱性9v电池。4.请不要把香烟烟雾，食物或者液体吹入仪器，否则会损坏传感器。5.每6-12个月仪器需要重新校准。仪器校准请联系本地经销商。6.请勿将本机连接直流电。</p>

"APRESYS,AP2020,呼吸式酒精检测仪"的品牌为APRESYS，型号是AP2020，类型为呼吸式酒精检测仪，测量范围是0，测量对象为0，测量精度是0，分辨率为0，电压是0（v），尺寸为0（mm），重量是0（kg）

, 电源为0, 预热时间是0 (s), 反应时间为0 (s)