

接头 气体接头 氧气接头 氧气接头装置 气源接头 爱德供氧

产品名称	接头 气体接头 氧气接头 氧气接头装置 气源接头 爱德供氧
公司名称	日照爱德医疗设备工程有限公司
价格	150.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:爱德 型号:1.0
公司地址	山东省日照市莒县夏庄镇阳光社区新华路9号（全家岭村）
联系电话	0633-6862777 13375532333

产品详情

产品详细介绍：

中心供氧站 中心供氧站由气瓶组、汇流排、自动切换控制台（也可手动）、报警装置等组成。当使用气瓶组作为供氧气源时，气瓶分为两组，一组工作，一组备用；当一组瓶内氧气压力降到某一规定值时，自动切换控制台进行自动切换，备用气瓶组即连续供氧；同时，报警装置自动发出声、光报警信号，警示工作人员更换气瓶。当输出压力低于规定值时，报警装置也发出声光报警信号，警示采取措施；当液氧与氧气瓶共同使用时，可以液氧为主，气瓶为辅或作备用。当安装了制氧机时，以自制氧源为主，气瓶备用。氧气管道和稳定装置 氧气经中心供氧站一级减压后，输送管道将压力减为0.4~0.5 mpa（可调）的氧气输送到各楼层内，可满足病员呼吸和启动国内外各型呼吸机、麻醉机，也可给高压氧舱供氧。氧气终端 经减压后的氧气由管道输送到各病房床头的氧气终端，终端上装有插拔式自封快速接头，快速接头的出口接滤化瓶。只将滤化瓶往终端插孔一插，氧气瓶就源源不断地输送给病人，不用时，只需轻轻一拔，气源就自动切断，停止送氧。

1、盒式终端上的插孔数根据病房需要而配置。室内管道可装多形铝合金装饰罩。适用于要求明装的医院，尤其适用于已经开诊的医院。增建供氧系统可不影响医院正常营业。

- 2、暗装终端适用于要求暗装的医院。插孔数按需要配置。管道装于槽内，上盖铝合金装饰板。
- 3、组合终端管带式组装终端品种齐全，由铝合金型材或钢板电咏喷塑制造，按需要配置多种气源插孔，颜色装璜自选，并可配置传呼、电源、灯具等附件，美观、大方、适用。
- 4、移动式终端适用于手术室。配置软管可左右移动。
- 5、调压配气机适用于手术室。可供吸气和启动不同压力要求的医疗设备。
- 6、吊塔适用于手术室。自动升降式或固定式吊塔均配置有各种气源与电源接口。

根据医院的不同要求，我公司研制了各种类型的终端，也可按用户要求改型设计生产。气压监视装置 气压监视盒可安装在值班室、护士站，压力表指示出本病区氧气压值，当值班人员发现氧压异常时，可以及时地报告总站，迅速维修。还备有便携式监视盒，可供随时监测终端压力。主要技术指标与特

- 点 1、最大供氧量 $40\text{m}^3/\text{h}$ ，日供氧量不小于70瓶/日。
- 2、末端输出压力 $0.1\sim 0.5\text{mpa}$ （可调） 3、系统小时泄漏率小于 0.2%
- 4、病床终端数量不限。不论终端多少均满足终端压力、流量要求。
- 5、氧气瓶组自动切换、声光报警。也可另接液氧装置。
- 6、终端用插拔式自封快速接头，操作方便可靠。
- 7、主要设备采用双路设计，可以不停气进行检修。

"接头 气体接头 氧气接头 氧气接头装置 气源接头

爱德供氧"的类型为其他，型号是1.0，品牌为爱德，加工定制是是