

专注品质 优质售后晶睿体重秤人体电子秤健康称广告礼品

产品名称	专注品质 优质售后晶睿体重秤人体电子秤健康称广告礼品
公司名称	武义汇尔日用金属制品厂
价格	22.00/其他
规格参数	产品类别:体重秤 品牌:汇尔 货号:he-3301
公司地址	中国 浙江 金华 永康市 曹园三街52号
联系电话	86-057987071851 18067628989

产品详情

品牌：gtee 晶睿 型号：he-3301

尺寸：直径330mm 包装：泡沫+彩盒/气泡+彩盒

钢化玻璃：6mm/8mm

尺寸：玻璃直径约33cm 玻璃厚度约6mm

- 1.使用前先打开电池旁边的电源开关
- 2.把开关档调制kg档
- 3.使用前把电子秤水平放置
- 4.先轻轻触动电子秤将自动启，屏幕将显示0.0kg 然后可以开始测试重量
- 5.长时间不用，电子秤自动节电会自动关闭
- 6.使用时再次轻触，又将自动开启

7.表面为特级强化玻璃，可安全承受2吨重量

8.长时间使用后如果Ice显示屏low显示，表示电池无电，需要更换电池了。

9.体重秤的最大可称量重量是 150kg

10.有时候秤出来的重量会偏差0.2kg左右的噢！

操作说明：

打开秤下方电池盖板，将开关拨到所需单位，右端为："lb",中间为切断电源，左端为："kg"

脚振动磅面，即可自动开机

开机后，显示8，并由左至右端逐位移动，直至显示“ 0.0 ”

人稳定站在磅面中间，开始称重，秤量值稳定后，显示闪烁，锁定秤量值。

人体秤量值显示，保持10秒后关机

若开机显示“ lo",表示电池已低效，应更换电池

称重显示“ --- ”，表示称重出错，应重新开始

注意事项：

手动开机后或将称移动后，应按操作说明使用

不使用时不要在称面上堆押物品，以免电池大量消耗，无法正常工作

称量时双脚尽量靠中间站稳，防止滑倒，以免无法锁定，显示不准确

不能用力重击称体

不要放在有水渍的地方使用，不能用水冲洗

出厂时已装配锂电池

因为电子体重秤具备效准问题,所以如果拿到后出现1.8公斤字样,请把体重秤平放在桌子上,手不要拿,把手从底下伸进去开关一次,就可以解决了,1.8就是玻璃的重量.

针对买家常见问题回答:

1.你家的称易坏吗? 答:产品是钢化玻璃做的,不人为损坏的话,一个称用过10年没问题.

2.称的称重范围是多少,起重多少,承重多少,电子用完了怎么办?

答:精准到0.1kg;起重5kg;最大承重150kg.电子用完了,可在当地的商店随处买到.

3.称出的重量比我平时重了10多斤? 答:称后有一个开关,居中是关,左右都可以开,但一边显示的是英磅(lb),另一边显示是千克(kg),如果亲不留意、开关开到了英磅那边,而误当成千克算,就会比平时重10多斤了.所

以称上要显示"00kg",才可以秤.

4.怎么我前后称出的重量会不一样,是不是不灵敏? 答:称是靠4个脚上的感应器感应检测重量的,如果你站立不平稳,以至称无法锁定,显示不正确.(你可以放物品在称上多次称,多次显示重量都一样,那称就是没有问题的了,因为物品你放好了不存在不平稳的情况.),所以建意亲们称体重时每次尽量居中平稳站立,以便得到更精准体重数据.

5.这个称每次开机都要踩好几下敲好几下才有显示,还不显示00kg? 答:敲一下要等2秒左右才会有显示的,接着敲几下反而有会延迟显示哦;称刚开机时,是不会直接显示00的,显示1.5、1.8、1.9等的情况都有,别急,显示过2秒后会自己消失,消失后再敲一下称就可以显示00kg了,这时就可以用称了.

6.这个称能用多久啊? 答:本商品本身出厂带一颗电子的,一颗正常可以使用一年到一年半左右.

武义汇尔金属制品厂是一家经国家民政局批准、商务部注册的一家民营企业。本公司凭着优质的产品、良好的信用和热心的服务与多家企业建立了长期的合作关系。本公司是专业生产电子人体秤的企业,可根据客户需要个性化定做不同款式、不同图案广告称与礼品称。我公司曾为纽约-纽约、索尼、金龙鱼、广发证券、中国人保、上海鸿得利重工等多家公司生产促销礼品。

电话:0579-87071851 手机:13758979233 地址:中国浙江省永康市曹园3街52号
公司主页:<http://www.huier1688.cn>

"【专注品质 优质售后】晶睿体重秤人体电子秤健康称广告促销礼品"的最大秤量为150KG,货号是HE-3301,产地为浙江永康,适用人群是成人,产品类别为体重秤,品牌是汇尔,产品类型是电子,功能是测体重,箱装数量为10台