

## 精美精准电子称体重秤健康秤体重计特价

产品名称	精美精准电子称体重秤健康秤体重计特价
公司名称	永康市华钧衡器厂
价格	17.00/个
规格参数	产品类别:体重秤 品牌:华钧 货号:3015
公司地址	胡库镇前杭村
联系电话	7062978

## 产品详情

品名称】华钧2013经典健康秤【产品材质】6mm 厚高强度圆形钢化玻璃台面，晶莹剔透【承重范围】2.5-150kg，运用高精度传感器贴片技术，可精确到0.1kg

产品正面：

产品反面

彩盒图片：

泡沫+彩盒

气泡+彩盒

【注意事项】1、初次使用，请将秤底“off”开关拨动到kg(公斤)或lb(磅)位置

2、初次开机会显示称体重量（2公斤上下），待自动关机后即可称重

3、将称放在平整的地面上，称体四角位置不平会影响称重

的准确度 4、人稳定站在秤面中间，开始称重，称重

值稳定后，显示闪烁，锁定称重量值，无称量变化，10秒钟后自动关机

5、保持干燥，勿碰水 6、不用

时不要在秤面上堆压物品，以免电池大量消耗无法正常工称是靠4个脚上的感应器感应检测重量的,如果你站立不平稳,以至称无法锁定,显示不正确.(你可以放物品在称上多次称,多次显示重量都一样,那称就是没有问题的了,因为物品你放好了不存在不平稳的情况.),所以建意亲们称体重时每次尽量居中平稳站立,以便得到更精准体重数据.

这个称每次开机都要踩好几下敲好几下才有显示,还不显示0.0kg?

答:亲你敲一下要等2秒左右才会有显示的,接着敲几下反而有会延迟显示哦;称刚开机时,是不会直接显示00的,显示1.5、1.8,1.9等的情况都有,亲别急,显示过2秒后会自己消失,消失后再敲一下称就可以显示00kg了,这时亲可以用称了.

## 产品特点

- 打开秤下方电池盖板,将开关拨到所需单位,左端为“kg”,中间为切断电源,右端为“lb”。
- 开机显示“0.0”,把秤置于水平地面,等待自动关机后,方可上秤称量。
- 脚站在秤面上,即可自动开机。
- 人稳定站在秤面中间,开始称量,称量值稳定后,显示闪烁,锁定称量值。
- 人体称量值显示,保持10秒后自动关机。
- 若开机显示“lo”,表示电池已低效,应更换电池。
- 称量显示“---”,表示称量出错,应重新开始。
- 保持干燥,勿碰水。

## 其他产品

## 注意事项

- 不使用时不要在秤上堆压物品,以免电池大量消耗,无法正常工作。
- 秤量时双脚尽量靠中间站稳,以免滑倒。
- 人在秤面上应平稳站立,以免无法锁定。显示不准确。
- 不能用力重击秤体。
- 不要放在有水渍的地方使用,不能用水冲洗。
- 出厂时已装配锂电池。
- 正常称重时本产品仅受静压力。当非正常使用并受到撞击,打击,冲击或跌落时,很容易损坏秤并且造成危险。
- 不可使用化学药剂擦拭秤体,必须时用沾水的湿布擦秤,但应避免水进入秤内。
- 为确保秤的使用寿命,请不要将秤放在过度湿热的环境中。
- 如果秤在开机时无显示,请检查电池与触点是否接触不良。若秤已使用很久,应确认是否需要更换电池再试。
- 本产品只可做家庭称体重之用,不得用于商业或其他用途。

• 所称物体不能超过最大称量值，当物体的重量超过最大称量很多时会损坏产品的传感器。

操作说明和注意事项：

- 1, 初始使用，请将称低“ off ”开关拨动到你所需的kg或lb位置
- 2, 本秤首次着地开机会显示称体重量（2公斤左右），待自动开机后重新开机画面8888，显示“ 0.0”即可秤重
- 3, 将秤放在平整的地面上，称体四角位置不平会影响秤重的准确度
- 4, 人稳定站在秤面中间，开始称重，称重值稳定后，显示闪烁，锁定称重量值，无称量变化，10秒钟后自动关机
- 5, 若开机后显示：“lo-”,表示电池已低效，应更换电池（3v-cr2032锂电池）
- 6, 称量显示“ —— ”表示称量出错，待开机后重新开始
- 7, 保持干燥，勿碰水
- 8, 不使用时不要在秤面上堆压物品，以免电池大量消耗无法正常工作
- 9, 人在秤上应平稳站立，以免无法锁定，显示不正确
- 10, 不能用力重击秤体
- 11, 称量最大误差（0.1-0.3公斤）

"批发精美精准电子称体重秤健康秤体重计厂家特价直销"的颜色为小号260\*5mm,大号330\*6mm，最大秤量是150kg，货号为3015，材质是玻璃，产地为浙江，适用人群是成人，产品类别为体重秤，品牌是华钧，产品类型是电子，功能是测体重，箱装数量为20