

英维康制氧机 9LXO2AWQ (九升)

产品名称	英维康制氧机 9LXO2AWQ (九升)
公司名称	北京市裕民永昌医疗器械有限公司
价格	15880.00/件
规格参数	加工定制:否 类型:制氧机 提取气体类型:氧气
公司地址	北京市房山区阎村镇北坊村南27号
联系电话	13552754899

产品详情

买制氧机有礼品相赠，三选一任选一件。产品名称：英维康制氧机九升型

品牌：英维康(invacare)

产地：苏州

产品型号：irc9lxo2awq

英维康制氧机常见问答：

1. 英维康制氧机湿化瓶里加什么水?多久清洗一次?怎么清洗?

答：加蒸馏水、纯净水或凉开水。每天清洗。肥皂水清洗后，用1：10的醋水溶液漂净，然后用热水彻底洗净,尽量少用自来水清洗。

2. 英维康制氧机湿化瓶接头在哪?

答：制氧机侧面有个过滤器门，在门顶部的凹槽插入一字螺丝刀，轻轻撬开过滤器门，湿化瓶接头在过滤门入口旁边，上拉拿出湿化瓶接头即可。

3. 英维康制氧机外壳两侧的黑色一级过滤棉如何清洗?多久清洗一次?需要晾干后再安装吗?

答：用吸尘器或者温肥皂水清理，并用清水漂净。至少一周清洗一次。必须充分晾干后再重新安装。

4. 英维康制氧机二级过滤器在哪?多久更换一次?

答：打开制氧机侧面的过滤器门，就能看到纸质塑料外壳的二级过滤器。根据使用环境不同而有所区别，多尘、多烟、空气污染严重等环境1000小时左右，正常1500小时左右。

5. 每间隔10秒左右机器有排气的声音正常吗?

答：正常的。英维康制氧机的原理是：分子筛材料吸附空气中的氮气，从而产生高浓度的氧气，排气声排出的是氮气。

6. 电源线插头松容易脱落是怎么回事?

答：电源线上有个用作固定的夹片，插座左侧(或右侧)底座上有个黑色(或白色)螺丝钉(白金系列在左侧黑色，完美系列在右侧白色)，用十字螺丝刀取下螺丝钉，螺丝钉穿过电源线上的固定夹片，将其固定到原来的螺丝钉孔上即可。

买制氧机赠以下三件的任意一件。制氧机保修三年。喷涂坐便椅。两升氧气瓶。天津喷涂轮椅。

"英维康制氧机 9LXO2AWQ (九升)"的加工定制为否，类型是制氧机，提取气体类型为氧气，提取气体状态是气态，应用领域为医用、制药，作用原理是压缩，品牌为英维康，型号是9LXO2AWQ，外形尺寸为46.7X36.5X67.0 (mm)，重量是24 (kg)，产品类型为全新