

k-010供应各种型号数字电子体温计机芯1

产品名称	k-010供应各种型号数字电子体温计机芯1
公司名称	莆田市涵江区科杰电子装配厂
价格	4.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:koko 型号:009
公司地址	中国 福建 莆田市 涵江区江口镇石庭工业区
联系电话	86 0594 3680750 13959562870

产品详情

我司专业为各知名产商代加工电子体温计机芯,月

产品概况本体温计分为摄氏\华氏两种,测量范围为摄氏32-42.9度,华氏90-107.6度技术参数测量精度:最小分度值0.1 测量误差:32 -35 范围内是 ± 0.2 ,35 -39 范围内是 ± 0.1 ,39 -42 范围内是 ± 0.2 ;华氏依次类推;显示方法:液晶显示,最小分度0.1 功耗:工作状态下为0.15mw电池:lr/sr-41型1.5v普通纽扣电池电池寿命:可保证体温计连续工作1000小时 本产品的工作温度:0 -55 工作湿度:80%,本产品的工作电压:1.5v。 外形尺寸:129x22x14mm(塑壳包装尺寸)净重量:约11克4.产品功能4.1电子体温计系以微电脑科技、提供使用者快速准确方便之量温效果。4.2外壳系采用塑胶原料,无传统水银式温度计的容易破碎,水银污染环境与不易读取的问题。4.3以lcd液晶显示。4.4简单使用说明(配有说明书的):数字显示温度,清晰、易读。测温范围32-42 $^{\circ}$ c,精确度可达 $\pm 0.1^{\circ}$ c4.5锁定功能:有自动记忆功能,记忆最终体温测试结果。防水设计,耗能低,每节电池可以使用两年之久。尤其是电子体温计不含水银,对人体及周围环境无害,可直接口腔内测温,特别适合于家庭、医院等场合使用。显示方式:液晶显示5产品特点5.1计量精确,速度快;5.2读数方便,不同于一般体温计看刻度,左照右照,电子数字体温计采用数字显示,直接告诉你多少度。5.3测量提醒:测量好温度会有声音提醒你,不同于普通体温计,拿早了怕没测好,拿迟了又耽误时间。5.4记忆功能:温度读出后会一直记忆在温度计中,直到下次测量。6.使用说明书:使用前,应先用酒精对体温计传感头进行消毒2按压电源键,蜂鸣器会发出蜂鸣声,显示提示符号

名称:数字式电子体温计

性能特点:

- 1、具有读数方便、测量精确、无汞害等优点并具备蜂鸣提示及记忆功能
- 2、特别适合家庭、医院等场合使用

3、电子体温计能快速、准确地测量人体体温

规格说明：

- 1、测量时间：60秒左右。
- 2、测量范围: 32 - 42.9 (90.0 -109.9)
- 3、精度: ± 0.1 从35.5 到42.0 (± 0.2 从95.9 到107.6)
 ± 0.2 低于35.5 或者高于42.0 (± 0.4 低于95.9 或者高于107)
- 4、蜂鸣提示: 温度测量完成时，发出约5秒钟的蜂鸣提示声
- 5、显示方式: 三位半液晶显示
- 6、电 池: 1.55v钮扣电池（ag3）一节
- 7、功 耗: 工作状态时0.15毫瓦
- 8、电 池 寿 命: 一年半
- 9、重 量: 约10克
- 10、使用环境: 标准室温环境下，25 (77.0)

测量的正确方法：

1：口温测量：

将体温计前端放舌下由侧位置，测量时要将口

完全紧闭，正常口温约35.5 -37.4 。

2：肛温测量：

如果医师建议使用肛温，可在体温计前端部分涂上水溶性润滑液，

以方便测量，请勿使用凡士林油，正常肛温约36.2 -37.9 。

3：腋温测量：

将体温计放置于腋下，接触皮肤。测量前请确保腋下无汗，将体温计

放于腋下和身体平行的位置，手臂紧靠身体，以确保体温计被完全覆盖

且不受空气影响。正常腋温约35.0 -37.0 ，为达到较稳定的腋温测

量建议在测量腋温时即使蜂鸣器发出测量完毕声响（哔哔声）后，仍建

议持续测量1-2分钟。

注意：儿童在测量体温时应有大人的陪伴，若比较两支体温计，即使两者的误差值相当，也有可能测得不同的温度，差异是测量手法不同所致。

清洁方法

使用水溶性的清洁剂及冷水清洁体温计的顶端或用75%

的医用酒精擦拭感应部分以消毒。

"k-010供应各种型号数字电子体温计机芯1"的材料为混合物，种类是热敏，加工定制为是，防护等级是一级，材料物理性质为绝缘体，型号是009，材料晶体结构为非晶，分辨率是0.1.0.01，品牌为KOKO，输出信号是数字型，灵敏度为10秒，30秒60秒，制作工艺是集成