

YQY-740L医用氧气吸入器

产品名称	YQY-740L医用氧气吸入器
公司名称	上海星辑五金机电有限公司
价格	63.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:上海星辑 型号:yqy-740l
公司地址	上海市金山区吕巷镇新东街4号3007室
联系电话	13916250823 13817313600

产品详情

yqy-740l氧气吸入器

由于气瓶内压力较高，而气焊和气割和使用点所需的压力却较小，所以需要减压阀来把储存在气瓶内的较高压力的气体降为低压气体，并应保证所需的工作压力自始至终保持稳定状态。总之，减压阀是将高压气体降为低压气体、并保持输出气体的压力和流量稳定不变的调节装置。

减压器的安全使用

使用减压阀应按下述规则执行：

(1)氧气瓶放气或开启减压器时动作必须缓慢。如果阀门开启速度过快，减压器工作部分的气体因受绝热压缩而温度大大提高，这样有可能使有机材料制成的零件如橡胶填料、橡胶薄膜纤维质衬垫着火烧坏，并可使减压器完全烧坏。另外，由于放气过快产生的静电火花以及减压器有油污等，也会引起着火燃烧烧坏减压器零件。

(2)减压器安装前及开启气瓶阀时的注意事项：安装减压器之前，要略打瓶阀门，吹除污物，以防灰尘和水分带入减压器。在开启气瓶阀时，瓶阀出气口不得对准操作者或他人，以防高压气体突然冲出伤人。减压器出气口与气体橡胶管接头处必须用退过火的铁丝或卡箍拧紧；防止送气后脱开发生危险。

(3)减压器装卸及工作时的注意事项：装卸减压器时必须注意防止管接头丝扣滑牙，以免旋装不牢而射出。在工作过程中必须注意观察工作压力表的压力数值。停止工作时应先松开减压器的调压螺钉，再关闭氧气瓶阀，并把减压器内的气体慢慢放尽，这样，可以保护弹簧和减压活门免受损坏。工作结束后，应从气瓶上取下减压器，加以妥善保存。

(4)减压器必须定期校修，压力表必须定期检验。这样做是为了确保调压的可靠性和压力表读数的准确性。在使用中如发现减压器有漏气现象、压力表针动作不灵等，应及时维修。

(5)减压器冻结的处理。减压器在使用过程中如发现冻结，用热水或蒸汽解冻，绝不能用火焰或红铁烘烤。减压器加热后，必须吹掉其中残留的水分。

(6)减压器必须保持清洁。减压器上不得沾染油脂、污物，如有油脂，必须在擦拭干净后才能使用。

(7)各种气体的减压器及压力表不得调换使用，如用于氧气的减压器不能用于乙炔、石油气等系统中。

联系人：毛从义

电 话：021-69577030

传 真：021-51862606

手 机：13788936680

地 址：上海市嘉定区宝钱公路5000弄280号

阿里旺旺：xingjimy

腾讯qq：136424933 707843105 1409078229

电子信箱：13788936680@126.com

"供应YQY-740L医用氧气吸入器"的结构为单级式，环境温度是0-25（ ），加工定制为是，测量范围是0.01-2.5（ MPa），型号为YQY-740L，额定流量是1（ m³/h），品牌为上海星辑，适用介质是氧气，用途为氧气吸入器，额定出口压力是0.15（ MPa），装箱数为10，工作原理是反作用式