

外科糖足清创机-多功能超声清创仪

产品名称	外科糖足清创机-多功能超声清创仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 超声频率:40 ± 25HKz 脉动压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

糖尿病足清创机 MUI-T8

糖尿病足一般需要采取清洗、消毒、扩创、清理、包扎等方式来清创。糖尿病足是糖尿病患者出现神经病变，导致足部供血不足引起的临床症状，需要积极配合医生给予相关处理措施。

- 1、清洗：通常需要用清水对局部清洗干净。
- 2、消毒：一般可选择生理盐水、碘伏消毒液对局部进行消毒，避免手术过程中发生感染意外。
- 3、扩创：此方法主要是为了让伤口充分暴露，有利于医生操作。
- 4、清理：暴露伤口后，可由专业医生采取相应的手法，彻底清理掉患处的坏死组织，达到清创的目的。

创面超声修复设备——超声波多功能清创仪MUI-T8具有快速脉动压力清创和超声波清创及废液回收三位一体之功能选用56kpa安全水压和40±5KHZ的超声波产生的空化效应、机械效应和温热效应,同时设备还有清洗液预热的功能。

快速压力清创将产生出脉冲压力水,使创伤组织表面在收缩和舒张之间有规律的反复交替出现,冲洗液中的水流气泡破裂产生的推力,将使夹杂在创面的污染物松动地被水流带走。通过冲洗液的多种物理联合作用可达到清除

创面的异物,这种清创主要用于大面积开放性创伤。使用中冲洗枪的脉动压力水流在医务人员的操作下可以从任意角度针对性地冲洗创面,大大提高清创的速度和洁净度。

创面超声修复设备——超声波多功能清创仪MUI-T8彻底清除坏死组织,且对正常的组织无损伤,并能促进肉芽组织生长,加快伤口愈合。该设备科技含量高且临床效果好,使用超声波清创机后能够缩短创面愈合时

间,缩短患者住院时间,拼了床

位的使用率,提务人员的工作效率,增加就诊率。能清创机开创了各种伤口/创面治疗的新时代;路类感染伤口/创面及难愈合伤口患者的福音。被医学界誉为新世纪设备。

清创功能：

创面超声修复设备——超声波多功能清创仪MUI-T8是将清洗液产生空化效应,使得微水滴形成气泡- +增大- 破裂,产性出爆破力,当巨量连贯的微水滴形成连续气泡群,在气泡增大直至破裂过程中生成局域高密度的能量波,作用在溃疡组织表面并击碎

之,但对于完好的组织却没有任何损伤,这种清创主要用于溃疡组织。两种方式的清创交替工作可使创面清理更加干净、快速。废液回收通过负压吸引,可边清创边回收清创废液,避免污染打散使工作环境保持清洁。

这种冲洗方法明显优于传统的创面处理方式,大大减少借助纱布擦拭的次数、减轻患者的痛苦,大面积冲洗速度快捷、方便、清创时间缩短,深度伤口也可得到清除,避免发生二次污染,固体杂物和液体污染-同被清除,冲洗

后的污水容易回收、便于集中处理。

伴随临床的进步和治愈率提升,多功能超声清创机的设备进入佳境,投入临床使用。得到业内人士好评,以更加专业的清创方式,为患者带来科学安全的治疗方案。