

生产空间过滤洁净屏、高效过滤器厂家

产品名称	生产空间过滤洁净屏、高效过滤器厂家
公司名称	山东厚朴科技有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:厚朴瑞特 开关类型:手动 产地:德州
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园 德兴北路282号院内北首1号楼
联系电话	13869213339 18205347226

产品详情

适用范围

医用空气洁净屏是针对现在日益恶化的医院环境而研制出来的，它可在短时间内轻松实现局部空间内的污染空气远离医务人员及病人。广泛应用于实验室、手术室、负压病房、发热门诊、输液室、ICU重症监护室等。

本设备正常使用环境：

温度：5 ~ 40 ；

相对湿度： 75% ；

大气压力：75kPa~106kPa ；

电源：AC 220V ± 10V ， 50Hz。

产品概述

超薄型洁净屏外壳全部采用无花镀锌钢板喷塑，由风机、初效过滤网、送风静压箱、高效过滤器和均流板组成。且带有风速可调器，可根据实际情况进行风速调动。空气过滤系统主要的功能是不断地将外部空气通过初效过滤网和空气过滤器净化处理后，在放回空气中，空气过滤系统可保证出风口处的洁净度达到100级。

型号

JHP-150

技术参数

安装方式	移动式、壁挂式、吸顶式
外形尺寸	890 × 150 × 1400 mm
额定电压	AC 220V ± 10%
额定频率	50 Hz ± 1 Hz
额定功率	240 W
循环风量	600/400 /200m ³ /h
适用面积	25m ²
过滤效率	99.99% (直径为0.3 μ m)
噪音	65/60/50dB (A)
重量	65kg

技术参数

注：本公司保留对产品的设计更改权，产品如有设计更改，恕不另行通知。

面板使用说明:

1. 液晶显示:

FS:风机转速；

T:风机预约启动(单位：分钟)，预约过程中呈闪烁状态，确认后停止；

FV:风机风量；

T:风机运行时间计时(单位：分钟)；

FT:过滤器使用时间累计(单位：时)；

UV:杀菌灯(ON:打开，OF:关闭)；

T:杀菌灯预约启动(单位：分钟)/杀菌灯运行(单位：分钟)，预约过程中呈闪烁状态，确认后停止。

2. 按键:

风机：

I 短按，启动或关闭风机；

I 待机状态下，长按约2S，启动风机预约功能，计时数字闪烁，通过 或 调节预约启动时间，时间调好后长按约2S完成确认，此时右侧指示灯闪烁，预约成功；待数字为0时，风机自动启动。

杀菌：

I 短按，启动或关闭杀菌灯；

I 待机状态下，长按约2S，启动杀菌灯预约功能，预约计时数字闪烁，通过 或 调节预约启动时间，再次长按约2S，杀菌灯运行计时数字闪烁，通过 或 调节运行时间，时间调好后长按约2S完成确认，此时右侧指示灯闪烁，预约成功；待预约计时数字为0时，杀菌灯启动，待运行计时数字为0时，杀菌灯关闭。

：短按单个增加，长按以10为单位增加；

：短按单个减少，长按以10为单位减少；

清零：

I 长按约3S，过滤器累计时间清零；

I 短按，启动或关闭控制器。

3. 指示灯:

高：长亮时风机高转速指示，闪烁时风机预约功能启动指示；

中：长亮时风机中转速指示；

低：长亮时风机低转速指示；

杀菌：长亮时杀菌灯启动指示，闪烁时杀菌灯预约功能启动指示；

故障：过滤器达到规定使用时长指示。