

海俪恩 护理液120ml 护理液 美瞳专用护理液 彩色隐形眼镜 不包邮

产品名称	海俪恩 护理液120ml 护理液 美瞳专用护理液 彩色隐形眼镜 不包邮
公司名称	德州芭比爱隐形眼镜有限公司
价格	8.00/副
规格参数	品牌:海里恩 材质:2ham3 规格:1只
公司地址	浙江金华市德百物流批发中心
联系电话	86 0534 15715348265

产品详情

注意事项：1、认真仔细阅读护理液盒内所附的说明书；2、护理镜片前，必须用中性清洁剂彻底清洁双手；3、必须严格按照护理程序护理镜片；4、请勿重复使用用过的护理液；5、请在室温下储存，并避免儿童接触；6、不使用护理液时，请保持瓶盖紧闭，勿将瓶口触及任何物品，避免污染；7、请于包装所示有效期前使用，并在开瓶后120天内使用，以保持护理液的有效性；8、本品不适宜加热使用；9、请勿与其他护理液或眼药混合使用；10、若您对任何成分过敏，请勿使用本品。

】

产品特点：1、能呵护各种品牌的软性隐形眼镜。2、集免揉搓、除蛋白、清洁、冲洗、消毒、储存及保湿功能于一体。3、其独特的复合除蛋白清洁配方，有效清除附着于镜片表面的蛋白质沉积物。4、按规定程序护理后的镜片，如同每天更换新的镜片一样，让您享受清晰舒适的视觉。

注意事项：1、认真仔细阅读护理液盒内所附的说明书。2、每次按规定的保养程序清洁消毒镜片。3、取戴镜片前要先洗净双手，请不要用任何物品与保养液瓶口接触，用后请盖紧瓶盖。4、用过的保养液必须弃去，不可重复使用。5、保养液开瓶后，请在三个月内用完，以免影响效果。6、请在标示的有效期内使用。7、保养液应室温避光保存，不得高温消毒。8、请勿分装于其它小瓶中使用。9、眼睛如有任何不适，应停止配戴镜片，并立即咨询眼科医生或验配师。10、置本品于儿童无法触及处。11、每三个月更换新的镜盒。

挑选护理液7个要点隐形眼镜护理液对于配戴隐形眼镜的人来说，无疑是必不可少的。在进行选购时，务必要查看产品标签说明书上标注的以下内容：1) . 产品名称；2) . 规格、剂型；3) . 生产企业；4) . 生产企业卫生许可证号；5) . 使用方法和适用范围；6) . 注意事项；7) . 生产日期和保质期。注意：不要一次购买多瓶护理液。家中的环境与专业销售部门的保存环境有差异，不能为护理液提供合适的环境。) 目前市售的隐形眼镜护理液按类别可分为不具有消毒功能和具有消毒功能两类，按功能分可分为单一型与多功能型，包括清洁、消毒、冲洗、保存四个步骤，只具有其中一种功能的称为单一功能型

，同时具有四种功能称为多功能型，其中消毒环节是保证隐形眼镜镜片卫生的关键步骤。（2）因此，消费者要根据自己的需求合理选购相应的产品，不要将没有消毒功能的单一功能型产品当作多功能型产品使用，否则不但起不到保护镜片的作用，还会造成镜片污染、导致眼部感染，严重的会造成失明。护理液的成分到底是什么？这些成分具有哪些护理功能？不同隐形眼镜护理液的成分会略有不同，以多功能护理液来讲，成分主要包含：（1）可以安全有效地对隐形眼镜进行消毒和清洁的成分，这一成分在对隐形眼镜消毒和清洁的同时尽量把对眼部造成的刺激降到最低；（2）两种湿润剂，它们的成分和眼泪接近（这种湿润剂也被用于治疗干眼症的产品中），该成分可以在眼球上形成一层湿润的保护膜，提高佩戴隐形眼镜的舒适度，并且能长久保持眼球和隐形眼镜之间的润滑；（3）4种生理电解溶液和牛磺酸，使隐形眼镜护理液与人体泪水的生理环境更加匹配，这样可以保证佩戴隐形眼镜的健康和舒适度。对于选择隐形眼镜护理液，目前很多眼科医生推荐使用含有牛磺酸配方的护理液，因为牛磺酸存在于眼睛的细胞组织、泪液和其他身体组织（包括骨骼、心脏和大脑）中，具有抗氧功能，可确保角膜组织的正常生长，并能有效渗透细胞表面，起到加强修护细胞的作用。通过抑制人体泪液中有益的蛋白质溶菌酶氧化及变性，并调节上皮细胞的水分含量，减少蛋白变性的发生，起到维持眼睛“生态平衡”的作用，从而有效降低隐形眼镜配戴者眼睛瘙痒，甚至眼睛刺痛情况的发生。如何使用护理液1）、消费者仔细阅读使用说明。2）、要注意用眼卫生和个人清洁卫生。3）、使用后，产品的保存也不应忽视，不要将护理液放在潮湿的浴室或者阳光直射的地方，否则容易导致变质、发霉。4）、消费者要树立一个观念：隐形眼镜护理液是用来护理镜片而不是护理眼睛的。5）、如果发现眼睛红、痛、视力模糊，使用者应该停止使用并寻求医生的指导

"海俪恩 护理液120ml 护理液 美瞳专用护理液 彩色隐形眼镜 不包邮"的颜色为海里恩护理液，度数是0---800度，型号为海里恩，规格是1只，品牌为海里恩，用途是隐形眼镜，材质为2HAM3