

犬伤清创机（扫码版）-自洁式医用外伤冲洗器

产品名称	犬伤清创机（扫码版）-自洁式医用外伤冲洗器
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 容量: 300ml 压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

全自动伤口冲洗设备-犬咬伤清创机

全自动伤口冲洗设备-犬咬伤清创机适用于各种犬咬伤清洗清创、动物咬伤抓伤清洗清创等，利用肥皂水（弱碱性溶液）加生理盐水即可清理，56KPa的脉冲压力，每分钟800-1800次的脉冲频率，可以快速有效清除创面杂物、污渍、唾液等。降低伤口内细菌和病毒含量，预防狂犬病。

全自动伤口冲洗设备-犬咬伤清创机

犬伤清创机采用脉动压力技术，使用无线冲洗枪枪头，采用无菌包装的弱碱性皮肤黏膜通过自动化控制程序全自动完成高标准的犬伤冲洗处置。用于急诊科和外科对污染的开放性软组织损伤（如擦伤、刮伤、动物致伤、浅表皮伤口）术前的清洗和冲洗。尤其是动物抓咬伤口处理领域，大大降低了患者被病毒侵害的风险。

全自动伤口冲洗设备-犬咬伤清创机

整套控制系统以国家规范为框架，以伤患的安全为目标，精准的控制，一键开启即可自动完成一次标准的犬伤冲洗流程，甚至轻伤患完全可轻松完成自助冲洗。

整个冲洗过程中水温、水压、弱碱性皮肤黏膜与清水的交替冲会自动完成

结束时的打印等自动完成，并会作出语音提示，无需做其他任何操作

针对患、大面积撕裂伤患等特有手动功能，人员可根据情况选择的冲洗方式（手动模式同样有程序辅助，极大降低医护人员工作负担）。

消毒处理

彻底冲洗后用稀碘伏或其他具有灭活病毒能力的医用制剂涂擦或清洗伤口内部，可以灭活伤口局部残存的狂犬病病毒。

清创及扩创

犬咬伤伤口尤其撕裂伤清创去除坏死组织，必要时行扩创术，穿刺伤伤口可以进行必要扩创确保清创效果。伤口闭合的方法因咬伤类型不同而在一定程度上有差异，划伤及简单穿刺伤不需要Ⅰ期闭合。单纯撕裂伤伤口，临床医生可采取Ⅰ期伤口闭合。如果美观需要时，如面部撕裂伤，临床医生也可以对这类伤口选择Ⅰ期修复。

给予恰当的伤口处理对于接受Ⅰ期伤口闭合患者的预后和降低感染风险极为重。缝合咬伤伤口时，需要进行充分的冲洗、清创，避免深部缝合（如果可能），预防性抗生素治疗以及密切随访。

预防破伤风

犬咬伤伤口属污染伤口，感染破伤风几率较高，应根据《非新生儿破伤风诊疗规范（2019年版）》中附件1《外伤后破伤风疫苗和被动免疫制剂使用指南》进行破伤风预防。

预防狂犬病

犬咬伤是狂犬病发生的主要途径，可能感染发病，应根据现行的狂犬病暴露预防处置的规范、指南进行狂犬病预防。