

家用氧气瓶4L 医用氧气瓶 医用供氧器4L

产品名称	家用氧气瓶4L 医用氧气瓶 医用供氧器4L
公司名称	济南树隆商贸有限公司
价格	260.00/个
规格参数	加工定制:否 型号:氧气瓶供氧器 规格:4l
公司地址	山东济南市市中区西红庙
联系电话	86 0531 87561599 18660179356

产品详情

图片

三、适用范围

1. 缺氧性疾病患者
2. 高原缺氧
3. 氧保健
- 四、工作原理打开供氧器开关，氧气瓶内高压氧气经减压阀，再经过流量调节开关进行微调，即可输出所需的流量，连好导氧管，加湿器、吸氧管和鼻塞即可输氧。
- 五、使用方法1. 使用前的准备和检查使用前必须到法定的医用氧气站充装氧气。检查氧气储量、打开气瓶开关，观察氧压表的指示即可知储气瓶内的储氧量，如压力氧量小于0.05-0.1mpa时，应补充医用氧气。2. 加湿器的使用a：使用时拧下上盖，往加湿器中加入蒸馏水或冷开水至上下水位标线之间。拧紧上盖，水位低于下标线时及时补加水。b：按加湿器上部的标记，将供氧器出氧管接到加湿器的供氧嘴上，将吸氧管接到加湿器的出氧嘴上，切勿接反（参见图2）c：使用前仔细检查导氧管、吸氧管、加湿器、是否清洁。d：当氧气通过加湿器时，可以看到杯内有气泡出现，表示加湿器工作正常。
- 六、吸氧1. 缓慢打开气瓶开关，根据需要调节至适当流量再将输氧鼻塞插入鼻前庭部位即可输氧见图1。2. 吸氧完毕先拔出鼻塞关闭气瓶开关，待压力降至0时，再关闭流量调节阀。
- 七、注意事项1. 充装氧气必须到法定的医用氧气充装站。2. 加湿器严禁倾斜。3. 使用环境温度不得超过40。4. 气瓶开关，开启与关闭应缓慢，不要用力过猛。5. 供氧器应严禁沾染油污，严禁碰撞、扔摔，远离热源、火种及易燃易爆物品，避免强日光直接照射，不得粘贴橡皮膏。6. 非使用期间，气瓶开关必须处于关闭状态。7. 气瓶内氧气压力不得低于0.05mpa。8. 产品出现故障不能继续使用，也不得随意拆卸，及时和经销商或厂家联系。9. 按瓶肩部钢印时间，每三年送具备法定资格的检验单位进行检验。10. 缺氧性疾病患者，应在医生指导下选择氧流量大小。11. 第一次向氧气瓶内充氧时，应进行医用氧置换。12. 导氧管仅供一次性使用。

''

"供应家用氧气瓶4L 医用氧气瓶 医用供氧器4L"的工作压力为高压气瓶（mpa），公称容积是4（L），材

料为刚，加工定制是否，公称重量为10（kg），充装介质性质是永久气体气瓶，制造方法为钢制无缝气瓶，型号是氧气瓶供氧器，规格为4L，适用范围是人体吸氧