

全自动电脑心肺复苏模拟人JS/CPR280S医学模型

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 全自动电脑心肺复苏模拟人JS/CPR280S医学模型 |
| 公司名称 | 上海锦沙科教仪器设备有限公司 |
| 价格 | 3500.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:上海锦沙 材质:pvc 规格:88*52*37 |
| 公司地址 | 上海市闵行区元江路5500号第1幢E490室 |
| 联系电话 | 021-61995929 15216854003 |

产品详情

产品型号：js/cpr280s

产品概述：js系列心肺复苏模拟人:国家卫生部、中华医学会、中国工程师协会、中国红十字会指定推荐使用产品 心肺复苏术，国际用语：cardiopulmonary resuscitation. 简称：cpr。骤停（如心脏疾病、心肌梗塞、触电、溺水、中毒、矿难、高空作业交通事故、旅游意外、自然灾害、意外事故等所造成的心脏骤停），而现场第一目击者采取呼救、心肺复苏术等紧急求助措施。采取现场心肺复苏术，2010国际最新操作标准：c胸外按压 a开放气道 b人工呼吸，替代原来2005的cpr操作顺序（a、b、c三大步骤：即a—气道开放。b—人工呼吸。c—胸外按压），有条件可采取d—自动体外除颤。而现场抢救人员，必须要规范标准进行心肺复苏术c、a、b、d步骤抢救，才能使病人生命在最短的时间内获救。因此。医疗卫生医务工作者及广大群众必须要学会心肺复苏技术，学会这门技术，必须要建立师资培训与有相应的配套器材，js为您提供仿真人心肺复苏技术训练模型。

全自动电脑心肺复苏模拟人的描述：

js/cpr280s全自动电脑心肺复苏模拟人

执行标准：美国心脏学会(aha)2010国际心肺复苏(cpr) & 心血管急救(ecc)指南标准功能介绍： 数码显示、动态指示灯显示、语音提示。 人工手位胸外按压时：1、条码指示灯显示按压强度；2、数码计数显示；3、语言提示：· 按压深度正确(5-6cm区域)由条码绿灯、按压深度不够（小于5cm)由条码黄色、按压深度过深（大于6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈显示cpr按压深度； 模拟标准气道开放显示； 人工口对口呼吸(吹气)时：1、条码指示灯显示潮气量；2、数码计数显示；3、语言提示：· 吹入的潮气量正确（500ml~600ml）由条码绿灯、· 吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯

移动的动态反馈显示潮气量度； 按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人） 操作周期：30次有效胸外按压及2次人工吹气，再按压与人工吹气30：2五个循环周期cpr操作。 操作频率：最新国际标准：至少100次/分。 操作方式：训练操作；考核操作。 操作时间：以秒为单位计时。 语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。标准套配置： 高级复苏全身人体模型一具； 高级电脑数码显示器一台； 豪华手拉推式人体硬塑箱一只； 复苏操作垫一条； 屏障面膜(50张/盒)一盒； 可换肺囊装置四套； 可换面皮一只； 2010国际最新操作指南光盘一盘； 现场急救常用技术使用手册一本； 保修卡、合格证； 使用说明书一本。

网站：www.shmoxing.com 本公司郑重承诺：本店所有医学教学模型均为锦沙厂家直销，以最优惠的价格，提供最优质的质量以及最完善的售后服务保证，请放心购买使用！

专业销售医学急救模型、基础护理模型、心肺复苏模型、人体解剖模型、针灸模型、人体骨骼模型等二十多大类模型，公司始终“质量第一，客户至上，以一流产品占领市场，以优质服务回报顾客，作为本公司的质量方针；“诚实、守信”是我们的企业理念；“优质、务实、高效”是我们永远的承诺；公司将一如既往地持续改进质量管理体系，以及配合客户进行方按设计和工艺设计，不断满足、提高顾客的需求，确保客户对产品更加满意！上海锦沙科教仪器设备有限公司是上海教学仪器设备行业协会会员单位，上海医疗器械行业协会会员单位。在打造创新、发展的公司文化的同时，公司坚持用企业文化提升企业核心竞争力，使企业在发展中树立起良好的社会形象。“行远必自迩、追求无止境”。“锦沙”将一如既往的奋进不息，为中国医学教育行业的事业奉献光热，为锻造中国医教行业的产业丰碑而永远向前。

"全自动电脑心肺复苏模拟人JS/CPR280S医学模型"的规格为88*52*37，品牌是上海锦沙，材质为pvc，属性是教学模型