

# 中伦品牌 孕妇分娩球 导乐分娩球 医用分娩球生产厂家 导乐助产分娩球带架

产品名称	中伦品牌 孕妇分娩球 导乐分娩球 医用分娩球生产厂家 导乐助产分娩球带架
公司名称	湖南中伦精密科技有限公司
价格	429.00/件
规格参数	品牌:湖南中伦 型号:湖南中伦-导乐分娩球 产地:长沙市
公司地址	湖南省长沙市岳麓区望月湖街道望月湖9片1栋10 2房
联系电话	18273146314 18273146314

## 产品详情

孕妇分娩球 导乐分娩球 医用分娩球参数-型号-厂家价格湖南中伦品牌

中伦品牌 孕妇分娩球 导乐分娩球 医用分娩球生产厂家 导乐助产分娩球带架

0导乐球是什么？

湖南中伦品牌的导乐球不是瑜伽球，导乐球是加厚放突然爆破的分娩球，不是运动用的瑜伽球。请看清湖南中伦品牌导乐分娩球。

1孕妇分娩球有啥作用？

导乐分娩球可以帮助解决这些问题的：它可以使婴儿处于开始和继续分娩的良好位置，并且可以使妈妈在分娩时自由活动。分娩过程中的自由活动是一名分娩中的孕妈妈可以帮助其婴儿降入产道的方法之

一。妈妈本能地以对她和婴儿有帮助的方式移动。但是运动可能会很累，因此分娩球可以在妈妈继续移动和摇摆的同时帮助她缓解疲劳加速产程。

导乐分娩球怎么使用？

2导乐球怎样使用？

不要使把球充气到饱满。您希望它有一点柔软，因为这使它更加舒适：

(1) 脚平放在地板上，坐在球上，并分开，与出生球形成三脚架。

(2) 向后滚动肩膀，并稍微拉低您的下腹部（而不仅仅是让它垂下来）。

(3) 您可以尝试做一些小的臀围来伸展骨盆。

或者，您可以使用球来帮助您练习下蹲（打开骨盆并平衡身体的好方法）。

(4) 将出生球靠在墙上作为支撑。提起球，使其靠在中背部。

(5) 然后在蹲下时将球上下滚动。这在没有助产士或者其他人提供帮助的情况下非常有用。

3导乐球尺寸规格？

(1) 性能:安全防爆;

(2) 材质PVC, 加厚度2.0-2.4 mm;

(3) 颜色:暖色(粉红色)

(4) 型号：小号(身高158cm以下)；中号(身高155-168使用)；大号（身高165cm以上使用）

(5) 可配不锈钢分娩架(安全架)

(6) 使用场所：产房医用

(7) 品牌：湖南中伦

(8) 产地：长沙市

(9) 存储：阴凉

#### 4导乐分娩球/助产球配置清单

- (1) 球塞
- (2) 气筒
- (3) 气针
- (4) 气拔
- (5) 说明书
- (6) 合格证

#### 5使用导乐球产妇身体有哪些禁忌：

- (1) 母亲因素：高血压、癫痫症、心脏病等
- (2) 妊娠并发症：前置胎盘、胎盘早剥、多胎妊娠、早产、不稳定的胎位
- (3) 胎儿因素：胎心异常、羊水污染
- (4) 硬膜外镇痛分娩情况下不能使用
- (5) 非正常自然分娩情况下请遵医嘱

#### 6导乐球生产厂家

湖南中伦精密科技有限公司，全国导乐分娩产品lingdaopinpai，早在2013年就开始导乐分娩产品全国销售，老牌企业，请认准湖南中伦品牌，质量可靠，服务无止境，主营导乐球架，导乐椅，导乐垫，产妇导乐分娩车、悬挂分娩座椅组合、分娩台架，分娩花生球、花生分娩球架凳。

