

湖南中伦花生分娩球老牌企业镇痛分娩，减轻医疗负担

产品名称	湖南中伦花生分娩球老牌企业镇痛分娩，减轻医疗负担
公司名称	湖南中伦精密科技有限公司
价格	4219.00/件
规格参数	品牌:湖南中伦 型号:湖南中伦-导乐分娩球 产地:长沙市
公司地址	湖南省长沙市岳麓区望月湖街道望月湖9片1栋102房
联系电话	18273146314 18273146314

产品详情

老牌企业湖南中伦花生分娩球镇痛分娩，减轻医护负担

湖南中伦品牌助产分娩球在助产士指导下可以坐分娩球缓解疼痛 打开骨盆促进胎头下降 还可以利用分娩球转变宝宝下降过程中不正的胎位，花生球使骨盆变宽，这可能会鼓励处于朝上位置的婴儿旋转面朝下，从而使分娩过程更容易。

分娩是个痛并快乐的过程，准妈妈们待产时好好利用这个“大玩具”，让陪产的老公也参与进来，享受快乐分娩吧！

一、以下是一些常见的花生球姿势：

(1) 侧卧：侧卧，双腿略微弯曲，将花生球的狭窄中心放在大腿之间。你应该看起来像蹲着，但躺着。

(2) 抱膝姿势：这类似于侧卧姿势，但您将膝盖靠近胸部，以获得更深的下蹲姿势，从而进一步打开您的骨盆。

(3) 半坐弓步：背部支撑并处于半坐姿，将一条腿放在球的狭窄中间，另一条腿放在球的顶端下方。花

生球一旦到位，就可以向上推向您的臀部。护士可能会在球下面放一条毛巾来稳定它。你也可以换边来改变位置。

(4) 前倾：跪着面对床头，将上半身靠在花生球的狭窄中间。这在床头抬起时效果zuijia。

(5) 后倾：双手和膝盖面对床头，将一只弯曲的腿放在花生球上。20到30分钟后换边。

(6) 推动姿势：这个姿势类似于侧卧姿势，但将小腿放在球的长度上。这个位置可以用来帮助在推举之间休息。

(7) 跨骑姿势：这是在地板上做的，抓住某物（例如床尾）。跨过球并轻轻摇晃或弹跳。这可能会缓解不适，因为它会压在会阴区域。

二、更多花生球分娩姿势，联系湖南中伦导乐分娩。

三、花生分娩球尺寸如何选择？

请记住，使用正确的尺寸很重要。如果花生球太大，可能会给臀部带来压力。如果它太小，它不会帮助打开你的骨盆。花生球一般选择

3.1. 尺寸：92cm*46cm或者58cm*29cm

3.2材质：防爆PVC

3.3型号：FMHS-1（92cm*46cm）或者FMHS-2（58cm*29cm）

3.4产地：长沙

3.5品牌：湖南中伦

3.6颜色：[香薰紫](#)、[天空蓝](#)

3.7配置清单：花生球架

3.8性能要求；加厚防爆

四.湖南中伦花生导乐分娩球如何保养？

4.1保质期内

避免尖锐物品磕碰花生导乐分娩球；使用完毕后，清水打湿抹布，轻轻擦拭，最后干燥；最后放在花生导乐分娩球架内，给下一位产妇使用。

4.2超过保质期

超过保质期后，定期检查花生导乐分娩球的气密性，尤其是在分娩量比较大的科室，及时更换新的花生导乐分娩球。

五.湖南中伦花生导乐分娩球使用注意事项？

(1) 使用分娩球时准妈妈们需穿防滑的鞋子

(2) 使用时避免在分娩球上弹动时弯曲或旋转脊柱

(3) 使用分娩球的方法与时间根据准妈妈们自己的意愿与体力情况为宜，如出现不适反应或疲惫感，可暂停使用

六.湖南中伦花生导乐分娩球的禁忌症有哪些？

(1) 妊娠合并症和并发症，如重度子痫前期、多胎、前置胎盘等；

(2) 胎儿因素:胎心音出现异常等；

(3) 四肢不能自主活动,存在精神疾患或沟通障碍者。

七.厂家资质

湖南中伦精密科技有限公司，成立于2014年，公司技术实力雄厚，与多个省妇幼保健院、产科等密切合作与联系，具有多年的经验，值得新老客户信赖，主营导乐分娩产品，包括导乐球、花生球、导乐球架、导乐车、分娩车、产程车、热敷镇痛黄豆袋、摇摆导乐椅、导乐分娩凳、导乐师椅、分娩椅、香薰灯、分娩池、婴儿模型、产科模型、分娩台架等助产工具，拥有多项专利技术，真诚欢迎各界进一步深化合作。