

甘露醇结晶溶解恒温箱速溶解结晶FYL-YS-151L福意联

产品名称	甘露醇结晶溶解恒温箱速溶解结晶FYL-YS-151L福意联
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	73484.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

甘露醇结晶溶解恒温箱速溶解结晶FYL-YS-151L福意联相关-

甘露醇是临床上普遍用于治疗颅脑疾病、脱水、降低颅内高压的药品.护理管理中规定,抢救车内的甘露醇,必须结晶完好备用,每班交接并记录.临床发现甘露醇经过一段时间,均会出现不同程度的结晶,尤其在天气寒冷的季节更容易结晶.传统的解决办法是用热水化开结晶,不但影响患者抢救和治疗,还无形中增加了护士的工作量.福意联甘露醇恒温箱,作为溶解甘露醇结晶设备,37~42度的环境里进行溶解,或25~27度的环境下保温,优良大方便解决甘露醇结晶溶解问题,已经在各大医院广泛使用。

甘露醇结晶溶解恒温箱速溶解结晶FYL-YS-151L福意联产品参数：

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。
- 3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。
- 4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

甘露醇结晶溶解恒温箱速溶解结晶FYL-YS-151L福意联公司说明-甘露醇是一种己六醇，因溶解时吸热，有甜味，对口腔有舒服感，故更广泛用于醒酒药、口中清凉剂等咀嚼片的制造，其颗粒型作直接压片的赋形剂。甘露醇可用作*片的基料。指导意见：用于治疗各种原因引起的脑水肿，降低颅内压，防止脑疝。可有效降低眼内压，应用于其他降眼内压药效时或眼内手术前准备。甘露醇是通过提高血液的渗透压来达到脱水与利尿的作用。建议中小量高血压性脑-患者，发病24小时内不宜盲目使用常规剂量甘露醇脱水治疗，以免使血肿扩大，加重病情。而应根据脑压情况，临床医生在综合治疗的基础上，合理应用甘露醇。甘露醇结晶溶解恒温箱速溶解结晶FYL-YS-151L福意联