

医用加温箱速溶解结晶甘露醇加温柜（溶解箱）

产品名称	医用加温箱速溶解结晶甘露醇加温柜（溶解箱）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78373.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用加温箱速溶解结晶甘露醇加温柜（溶解箱）相关-

甘露醇注射液是临床上经常使用的输液制剂，其对降低颅内压、眼内压等具有显著的，且经济安全。但由于甘露醇的含量较高容易出现结晶等理化特点，给临床使用带来很多麻烦，如需在热水内放至全部溶解后方可使用，但这样不仅增加了污染机率，还因水湿后标签的脱落引起患者的疑惑。北京福意联注医用恒温保存设备16年，甘露醇结晶溶解箱以其优良、方便、稳定、安全在临床广泛使用，切实解决甘露醇结晶难题，提升护理工作的工作效率。

医用加温箱速溶解结晶甘露醇加温柜（溶解箱）产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用加温箱速溶解结晶甘露醇加温柜（溶解箱）公司说明-甘露醇静脉注射后迅速进入细胞外液而不进入细胞内。但当血甘露醇浓度很高或存在酸中毒时，甘露醇可通过血脑屏障，并引起颅内压反跳。利尿作用于静注后1小时出现，维持3小时。降低眼内压和颅内压作用于静注后15分钟内出现，达峰时间为30~60分钟，维持3~8小时。本药可由肝脏生成糖原，但由于静脉注射后迅速经肾脏排泄，故一般情况下经肝脏代谢的量很少。本药半衰期（ $t_{1/2}$ ）为100分钟，当存在急性肾功能衰竭时可延长至6小时。肾功能正常时，静脉注射甘露醇100g，3小时内80%经肾脏排出。医用加温箱速溶解结晶甘露醇加温柜（溶解箱）