

# 禽用气动自动注射机、禽用气动连续自动注射器、气动疫苗自动接种机、禽类气动智能注射仪

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 禽用气动自动注射机、禽用气动连续自动注射器、气动疫苗自动接种机、禽类气动智能注射仪 |
| 公司名称 | 湖州中安农业智能科技有限公司                            |
| 价格   | 8500.00/件                                 |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 长兴县经济开发区科技创业园212室                         |
| 联系电话 | 13116829946                               |

## 产品详情

详细说明:

雏鸡自动注射仪/小鸭自动注射机 国产单针双液自动注射机

适合给雏鸡、雏鸭、雏鹅进行疫苗注射，具有注射剂量准确、使用方便、自动计数、报警等功能，注射速度可达每小时5000羽，是各孵化场必备仪器。

自动注射机是用于一日龄至七日龄雏禽颈部皮下接种疫苗，抗生素，维他命或其他产品。

注射机有单液和双液两种，单液注射机一次可注射一种液体，双液自动注射机可同时注射两种液体（两种液体在进入禽体前是不混合的）。

注射机的注射组件有0.1ml、0.15ml、0.2ml、0.25ml、0.3ml、0.4ml、0.5ml几种规格（客户任选一种或几种规格），也可以根据用户要求定制。

注射机上有总计数器（统计清零前接种过的所有雏禽的数量）和预设定计数器（预先设定要接种的每盒或每箱雏禽的数量，接种到预设定的数量后机器会发出报警以提醒操作人员）。

使用该机器，熟练技术人员每小时可接种3000～6000羽。

禽用自动注射仪计数参数:

电源:220V AC

功率:50W

注射剂量:0.2ml

注射速度:4500羽/h

产品组成:主体箱1个，电源线1根，架杆7#针头20支 50ml注射针筒一支 医用软管1根

禽用自动注射仪操作步骤

- 1、将装有疫苗的药瓶挂在架杆上，使药瓶通过软管与后部的外接口连接
- 2、接入220V交流电源，将开关置于一档
- 3、按动注射触发开关数次，直到针头有稳定的射流为止。
- 4、按下清零按钮，使显示数字归零。