

新生儿气管插管模型,新生儿气管插管训练

产品名称	新生儿气管插管模型,新生儿气管插管训练
公司名称	上海振育科教设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东新区新场镇笋南路189号311室
联系电话	021-66270218 13386088996

产品详情

产品名称：新生儿气管插管模型,新生儿气管插管训练 产品型号：zy-

j15 了解详情：www.zycpr.com/qdgl/39.html 联系电话：021-66270218 qq:648451019 产品特点：本产品具有形态逼真的新生儿解剖结构，可进行口腔、鼻腔气管插管的操作训练。由进口pvc塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机注压而成，具有形象逼真、操作真实、结构合理等特点。 逼真的新生儿解剖结构。经口、鼻气管插管。 仿真材料的功能模拟。

可以通过吹气方式，测试插管是否正确的插入气道观察模拟双肺和胃的膨胀。 使用方法：

- 1、操作者站模型头侧，将头后仰80度，使口、咽、气管基本重迭一条线，将口张开。
- 2、使用时口、咽、喉先喷以肥皂水和洗涤精进行。
- 3、左手握喉镜把镜片伸入舌根，向上提拉，此时就会看到会厌软骨，将镜片逐渐移至舌根会厌各处，继续上提镜片，会厌软骨就会反跳复牢镜片，其下的菱形气管口便清晰可见。
- 4、右手拿气管内导入伸入口内与润滑剂接触后，在直视下将导管插入气管。
- 5、关于气管导管是否插入气管，有三种检查方法：
 - a：模型头部颈部截面通出的半透明气管支气管部分可看到模型气管导管；
 - b：把模型头竖起来，在其后孔内扳开咽后壁可见气管导管是否已插入气管内；
 - c：用气囊面罩复苏器的面罩端改接气管导管，予以加压充气，模型肺就会扩大，说明导管插在气管内。
- 6、经鼻插管时同样先在一侧鼻孔喷上润滑剂，然后将气管导管插入一侧鼻孔向后下方通过新生儿气管插管模型鼻道进入咽喉部，再在喉镜直视下用插管钳把气管导管引入气管内，检查方法与经口插管相同。
- 7、口、咽、喉喷润滑剂的目的就是使模型与活的新生儿窒息复苏模型模拟时口内条件相接近，同时也可减少模型损坏，延长使用寿命，气管插管的操作不必过多用力，以免损伤新生儿或模型。 经鼻胃管置入是常用的胃管置管方法。教科书传统的操作方法是；插管前先撤去患者的枕头，头向后仰，当鼻胃管插入15cm时，将患者头托起使下颌靠近胸骨柄，缓慢插入至预定长度。但在行气管插管的患者中，临床胃管插入时此方法首次成功率较低。