

热器融化结晶加温箱 医用加温箱FYL-YS-281L

产品名称	热器融化结晶加温箱 医用加温箱FYL-YS-281L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72087.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

热器融化结晶加温箱 医用加温箱FYL-YS-281L相关-

甘露醇注射液属高浓度液体,遇天气寒冷时易产生结晶.在药房时,由于保持有稳定的温、湿度不易产生结晶,而到各临床科室后则易形成结晶,且有多次溶解又多次再结晶的现象,给临床使用带来了不便.福意联甘露醇恒温箱,应用于未结晶甘露醇或结晶后已溶解的甘露醇,取得了良好的预防结晶的效果。

热器融化结晶加温箱 医用加温箱FYL-YS-281L产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

热器融化结晶加温箱 医用加温箱FYL-YS-281L公司说明-甘露醇注射液的适应症

(1) 组织脱水药。用于治疗各种原因引起的脑水肿，降低颅内压，防止脑疝。

(2) 降低眼内压。可有效降低眼内压，应用于其他降眼内压药效时或眼内手术前准备。

(3) 渗透性利尿药。用于鉴别肾前性因素或急性肾功能衰竭引起的少尿。亦可应用于预防各种原因引起的急性肾小管坏死。

(4) 作为辅助性利尿措施治疗肾病综合征、肝硬化腹水，尤其是当伴有低蛋白血症时。

(5) 对某些药物过量或毒物中毒(如巴比妥类药物、锂、水杨酸盐和溴化物等)，本药可促进上述物质的排泄，并防止肾毒性。

(6) 作为冲洗剂，应用于经尿道内作前列腺切除术。

(7) 术前肠道准备。

甘露醇的禁忌症 已确诊为急性肾小管坏死的尿患者，包括对试用甘露醇反应者，因甘露醇积聚引起血容量增多，加脏负担； 严重失水者； 颅内性-者，因扩容加重-，但颅内手术时除外； 急性肺水肿，或严重肺瘀血。

热器融化结晶加温箱
医用加温箱FYL-YS-281L