

甘露醇结晶溶解机_溶解甘露醇保温箱FYL-YS-430L

产品名称	甘露醇结晶溶解机_溶解甘露醇保温箱FYL-YS-430L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	66987.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

甘露醇结晶溶解机_溶解甘露醇保温箱FYL-YS-430L相关-

甘露醇注射液结晶后法使用，每年11月-4月不易保存,容易结晶。必须把结晶颗粒彻底溶解后方可使用，通常医用都会采用微波炉或者热水烫的方式，但是危险程度极大，容易产生瓶装或袋装的甘露醇注射液包装产生爆破！所以甘露醇防止结晶和溶解结晶成了医用难题。福意联甘露醇注射液防结晶保存柜，可用于已经结晶甘露醇在温度37~42度的环境里进行溶解，或25~27度的环境下保温，防止结晶现象的发生。

甘露醇结晶溶解机_溶解甘露醇保温箱FYL-YS-430L产品参数：

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。
- 3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。
- 4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

甘露醇结晶溶解机_溶解甘露醇保温箱FYL-YS-430L公司说明-甘露醇注射液的适应症

- (1) 组织脱水药。用于治疗各种原因引起的脑水肿，降低颅内压，防止脑疝。
- (2) 降低眼内压。可有效降低眼内压，应用于其他降眼内压药效时或眼内手术前准备。
- (3) 渗透性利尿药。用于鉴别肾前性因素或急性肾功能衰竭引起的少尿。亦可应用于预防各种原因引起的急性肾小管坏死。
- (4) 作为辅助性利尿措施治疗肾病综合征、肝硬化腹水，尤其是当伴有低蛋白血症时。
- (5) 对某些药物过量或毒物中毒（如巴比妥类药物、锂、水杨酸盐和溴化物等），本药可促进上述物质的排泄，并防止肾毒性。
- (6) 作为冲洗剂，应用于经尿道内作前列腺切除术。
- (7) 术前肠道准备。

甘露醇的禁忌症 已确诊为急性肾小管坏死的尿患者，包括对试用甘露醇反应者，因甘露醇积聚引起血容量增多，加脏负担； 严重失水者； 颅内性-者，因扩容加重-，但颅内手术时除外； 急性肺水肿，或严重肺瘀血。甘露醇结晶溶解机_溶解甘露醇保温箱FYL-YS-430L