

A—201日康PC吸奶器 销售日康系列产品

产品名称	A—201日康PC吸奶器 销售日康系列产品
公司名称	李凯尧（个体经营）
价格	4.00/个
规格参数	品牌:日康 材质:PC 容量:120（ml）
公司地址	中国 湖南 常德市鼎城区 桥南市场4A2998门面
联系电话	86 0736 2981829 13973616208

产品详情

品牌	日康	材质	PC
容量	120（ml）	适合年龄	育奶母亲
使用期限	10（年）	箱装数量	144（个/箱）
产品类别	吸奶器		

a—201日康pc吸奶器

日康婴儿用品有限公司是一家专业从事婴儿用品开发、设计、生产的制造商。已通过了《iso9001-2000》国际质量管理体系的认证，并率先获得了国家质检总局颁发的国内首批食品用塑料包装容器生产许可证。符合美国fda和欧洲en-71卫生和安全标准。日康品牌的每一款产品在设计初期都是根据婴儿的不同成长时期的生理特点和需求，经过反复论证、评审而确定的。从产品的材料选用、图案和颜色搭配等无不将自然、温馨融洽其中，成为现代妈妈和宝宝的至爱。

组件：乳杯、吸球、铝圈

颜色：红、蓝（随机发货）

重量: 80克

产品性能:

- 1、操作容易、体积小、携带方便。
- 2、采用世界先进设备，进口原料精制而成，强度高、不易破裂。
- 3、不要用橡皮球里的乳汁喂婴儿。

说明:吸出全部乳汁,可以促进乳汁的分泌,防止乳腺癌的产生

备注:可水中煮沸消毒

材质:聚碳酸酯(pc),橡胶,铝圈

【使用方法】(一)使用前请取下吸球(吸球不可煮),将吸奶罩清洗干净,并放入水中煮沸消毒1-2分钟,晾干备用。(二)用干净纱布及温水擦拭乳头,防止乳腺阻塞。(三)将吸球压瘪,罩口对准乳房按紧,吸奶罩突出部分朝下,慢慢放松手指,即可吸出乳汁。每次吸出的乳汁先倒入其他容器,再进行第二次操作。使用时应避免将乳汁吸进吸球。(四)用一用挤压乳房,另一手操作吸奶器,可提高吸出效率。

【爱心提示】(一)吸奶罩煮沸时水量应足够,避免产品因长时间接触到温度较高的锅底或锅沿而导致变形。(二)使用过程中如发现破裂现象,请即弃用,另购新品。(三)每次最好将乳汁全部吸出,这样可以促进乳汁的分泌,同时还可以防止乳腺癌的产生。(四)如不慎将乳汁吸入吸球,可用温水将吸球清洗干净并晾干。吸入吸球的乳汁不可以有来喂养宝宝。(五)为了保证宝宝健康成长,请务必选择正品。

日康品牌的每一款产品在设计初期都是根据婴儿的不同成长时期的生理特点和需求,经过反复论证、评审而确定的。从产品的材料选用、图案和颜色搭配等无不将自然、温馨融洽其中,成为现代妈妈和宝宝的至爱。浙江日康婴儿用品有限公司是一家专业从事婴儿用品开发、设计、生产的制造商,公司现有各类专业生产设备70余台(套),其中奶瓶生产设备均为日本和台湾进口,技术处于世界领先水平,奶咀生产设备采用液体硅胶注塑成型技术,技术处于国内领先水平,并正在开发国际先进的双色安全注塑产品的一次成型技术。