

VHP灭菌生物指示剂

产品名称	VHP灭菌生物指示剂
公司名称	上海纪革森实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:福泽爱斯 用途:过氧化氢空间灭菌效果验证 包装规格:100支/盒
公司地址	上海市奉贤区目华北路388号第一幢1932室
联系电话	4008785098 18016459330

产品详情

纪革森 (Mrogi) 品牌提供VHP灭菌验证生物指示剂

型号：H3726-3、H3726-4、H3726-5、H3726T

菌含量：103-106

包装：100套/盒

使用范围：用于VHP汽化过氧化氢空间灭菌效果验证，医疗、生物制药厂封灌室/厂房、食品加工厂房、实验室、分离器等空间的灭菌或杀菌，都可适用。

使用说明：

1. 在指定位置放置芽孢菌片袋，进行灭菌。
2. 灭菌处理后，将菌片袋移至超净工作台，在无菌条件下，用无菌镊子从菌片袋里取出芽孢菌片放入培养基中。
3. 培养基瓶盖拧紧后，插入专用的“ACE mini 恒温培养器（型号：H8200）”内，在56~60 温度间培养24小时。
4. 阳性对照：从未经过灭菌处理的芽孢菌片袋中取出芽孢菌片放入培养基中，同时进行

培养。每次培养时都必须使用阳性对照。

结果判读：

- 1、阴性：培养基保持紫色不变，则可认定为灭菌完全
- 2、阳性：对比阳性对照管培养基颜色，颜色由紫色变成黄色，则可认定为灭菌不完全

福泽爱斯公司简介：

福泽爱斯生物指示剂业务涵盖生物指示剂的研发、生产和供应。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队，致力于为客户提供高品质的产品和服务。公司秉承“诚信、专业、创新”的经营理念，不断提升产品质量和服务水平，以满足客户的需求。公司还积极参与行业交流与合作，推动生物指示剂技术的进步和发展。

福泽爱斯生物指示剂货号说明：

H3723A蒸汽灭菌生物指示剂

H3723T高压灭菌生物指示剂

H3723L液体灭菌生物指示剂

H3724环氧乙烷灭菌生物指示剂

H3725T过氧化氢灭菌生物指示剂

H6301低温蒸汽灭菌生物指示剂

H6301L低温蒸汽灭菌生物指示剂

H6302K干热灭菌生物指示剂

湿热灭菌生物指示剂

H6307甲醛灭菌用生物指示剂

H6304辐射灭菌生物指示剂

H3726-3过氧化氢生物指示剂

H3726-4过氧化氢生物指示剂

H3726-5过氧化氢生物指示剂

H3726T过氧化氢生物指示剂

