

H3726T过氧化氢空间灭菌生物指示剂

产品名称	H3726T过氧化氢空间灭菌生物指示剂
公司名称	上海纪革森实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:福泽爱斯 型号:H3726 福泽爱斯代理:上海纪革森
公司地址	上海市奉贤区目华北路388号第一幢1932室
联系电话	4008785098 18016459330

产品详情

纪革森 (Mrogi) 品质提供H3726T过氧化氢空间灭菌生物指示剂

商品品牌 : ACE test爱斯

型号 : H3726-3、H3726-4、H3726-5、H3726T

包装规格 : 100支/盒 (附培养基)

商品描述 :

汽化过氧化氢灭菌生物指示剂由 *Geobacillus stearothermophilus* 嗜热脂肪芽孢杆菌菌片和培养基两部分组成。用于超净工作台、无菌隔离器的灭菌效果检测 ; 病房内环境空间杀菌、制药/食品车间等的消毒效果检测。使用方便 , 仅需 24 小时的培养便可确认灭菌/杀菌效果。

技术参数 :

用途 医院、制药厂封灌室/厂房、食品加工厂房、实验室、分离器等空间的灭菌或杀菌

指标菌 *Geobacillus stearothermophilus*

芽孢数 1×10^6 以上

包装 100套 / 盒

使用说明：

1. 在指定位置放置芽孢菌片袋，进行灭菌。
2. 灭菌处理后，将菌片袋移至超净工作台，在无菌条件下，用无菌镊子从菌片袋里取出芽孢菌片放入培养基中。
3. 培养基瓶盖拧紧后，插入“ACE mini 恒温培养器（型号：H8200）”内，在56~60 温度间培养24小时。
4. 阳性对照：从未经过灭菌处理的芽孢菌片袋中取出芽孢菌片放入培养基中，同时进行培养。每次培养时都必须使用阳性对照。

结果判读：

- 1、阴性：培养基保持紫色不变，则可认定为灭菌完全
- 2、阳性：对比阳性对照管培养基颜色，颜色由紫色变成黄色，则可认定为灭菌不完全

纪革森（Mrogi）品质提供以下ACE test爱斯生物指示剂：

H3723T蒸汽灭菌生物指示剂

H3723A蒸汽灭菌生物指示剂

H3723L液体灭菌生物指示剂

H3724环氧乙烷灭菌生物指示剂

H3725T过氧化氢灭菌生物指示剂

H6301低温蒸汽灭菌生物指示剂

H6301L低温蒸汽灭菌生物指示剂

H6302K干热灭菌生物指示剂

湿热灭菌生物指示剂

H6305甲醛灭菌用生物指示剂

H6304辐射灭菌生物指示剂

H3726-3生物指示剂

H3726T生物指示剂

H6307生物指示剂

纪革森作为 3726T生物指示剂 | 汽化过氧化氢空间灭菌生物指示剂 | H3726生物指示剂 | 爱斯生物指示剂 厂家合作伙伴，可靠支持您 3726T生物指示剂 | 汽化过氧化氢空间灭菌生物指示剂 | H3726生物指示剂 | 爱斯生物指示剂 技术选型，您可在www.mrogi.com了解 3726T生物指示剂 | 汽化过氧化氢空间灭菌生物指示剂 | H3726生物指示剂 | 爱斯生物指示剂的详细介绍，也可通过纪革森工程师了解3726T生物指示剂 | 汽化过氧化氢空间灭菌生物指示剂 | H3726生物指示剂 | 爱斯生物指示剂的详细技术参数、分类、使用方法。