

液体加温箱 液体恒温箱 药液加温柜

产品名称	液体加温箱 液体恒温箱 药液加温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	70753.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

液体加温箱 液体恒温箱 药液加温柜产品说明-

手术室的温度一直以来手术室死亡的三大原因休克、低体温、凝血障碍困扰大家，福意联手术室恒温箱加温液体药品至人体温度，有效避免低体温症的发生。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等。

液体加温箱 液体恒温箱 药液加温柜产品参数：

液体加温箱 液体恒温箱 药液加温柜使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

液体加温箱 液体恒温箱 药液加温柜相关-人体核心温度的正常范围在36.5 ~ 37.5 之间。临床上通常将核心温度在34.0 ~ 36.5 之间定义为低体温，有研究表明，正常健康人体温低于35.5 时，去甲肾上腺素浓度可增至700%，血压明显升高，药物代谢减慢，凝血功能障碍，免疫功能受限制等。本研究结果显示，实验组患者手术前后体温变化不大，而对照组体温下降明显，术后体温<36 。液体加温箱 液体恒温箱 药液加温柜