

全自动电脑心肺复苏模拟人带IC卡管理软件系统

产品名称	全自动电脑心肺复苏模拟人带IC卡管理软件系统
公司名称	上海中弘科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中弘科教 型号:ZH-CPR580S-C
公司地址	上海市松江区中辰路225号-11
联系电话	021-64049756 13661681239

产品详情

产品名称：高级全自动电脑心肺复苏模拟人（ic卡管理软件）、带ic卡软件成人心肺复苏训练模拟人
型号：zh-cpr580s-c

产品介绍:

执行标准：美国心脏学会(aha)2010国际心肺复苏(cpr) & 心血管急救(ecc)新指南标准 功能介绍：

液晶彩显：人工呼吸与胸外按压、模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示。（按压过程中和急救成功后多会显示模拟心脏搏动和模拟心电图显示） 模拟标准气道开放； 人工手位胸外按压时： 1、动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域)由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）由条码黄色、按压深度过深（大于6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈显示cpr按压深度。（错误按压偏上、下、左、右多有指示灯光及语音报警提示） 2、液晶计数显示；详细记录按压错误的具体原因（按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数）。

3、语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。

人工口对口呼吸(吹气)时： 1、动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml~600ml-1000ml）由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度； 2、液晶计数显示：详细记录吹气错误的具体原因（按吹气量过大、吹气力量过小、及吹气正确的次数） 3、语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的具体原因，以便训练者及时改正。

按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）

操作周期：有效30次按压及2次人工吹气，30：2五个循环周期cpr操作。

操作频率：最新国际标准：至少100次/分。

操作方式：训练操作；考核操作(专业考核、普及考核)。

操作时间：以秒为单位计时。

语言设定：全程中文语音提示，可调节音量设定或关闭语言提示设定。

成绩打印：操作结果可热敏打印长条和短条成绩单 模拟人生命体征变化：初始状态时，模拟人瞳孔散大颈动脉无搏动，按压过程中颈动脉被动搏动搏动频率与按压频率一致，抢救成功后模拟人瞳孔恢复正常颈动脉自主搏动。 电源状态：采用220v电源，经过稳压器稳压输出电源24v。 学员管理软件与学员信息ic卡：各项考核操作信息同步记录在ic卡上，ic卡信息可在计算机上通过学员管理软件用于学员考试过程回放、成绩评分、考核发证、学员考核成绩档案管理。 材料特点：模拟人面皮肤、

颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。标准套配置：高级成人复苏全身人体模型一具；

高级电脑大屏幕液晶显示器一台；豪华手拉推式人体硬塑箱一只；

学员信息ic卡（20张/套）一套；学员信息软件一套；读卡器一个；

复苏操作垫一条；屏障面膜(50张/盒)一盒；可换肺囊装置四套；

可换面皮一只；热敏打印纸二卷；2010国际最新操作指南光盘1盘；

现场急救常用技术使用手册1本；使用说明书一本；保修卡、合格证；

注：计算机用户自配

中弘系列产品：高级大屏幕液晶彩显自动全电脑心肺复苏模拟人

高级小屏幕液晶自动电脑心肺复苏模拟人

高级移动显示自动电脑心肺复苏模拟人

高级计算机控制电脑心肺复苏训练模拟人

高级电脑心肺复苏模拟人带ic卡管理软件

高级多功能护理急救训练模拟人（心肺复苏、导尿功能）

高级全功能急救训练模拟人（心肺复苏与血压测量功能）

高级自动电脑心肺复苏模拟人

高级自动电脑心肺复苏训练模拟人

高级婴儿心肺复苏训练模拟人

高级儿童心肺复苏训练模拟人

高级半身心肺复苏训练模拟人

电子人体气管插管训练模型

男女性全功能护理人训练模型

友情提示：

您只要致电：021-64049756 021-64049758 021-64049751

我们可以帮您推荐符合您要求的高级全自动电脑心肺复苏模拟人zh/cpr580s-c相关产品。