

成人CPR急救训练模拟人，院前急救培训模拟人

产品名称	成人CPR急救训练模拟人，院前急救培训模拟人
公司名称	上海中弘科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中弘科教 型号:ZH/CPR580
公司地址	上海市松江区中辰路225号-11
联系电话	021-64049756 13661681239

产品详情

产品名称：高级中屏幕液晶彩显电脑心肺复苏模拟人（2010版）\院前急救培训操作模拟人
型号：zh/cpr580

品牌：中弘科教

产品介绍：

心肺复苏作为“第一救命技术”，心肺复苏操作程序从2005版心肺复苏操作流程a-b-c即：a开放气道 b人工呼吸 c胸外按改变为2010版心肺复苏操作流程c-a-b即：c胸外按压 a开放气道 b人工呼吸。

该中屏幕液晶彩显电脑心肺复苏模拟人

产品采用美国心脏学会(aha)2010国际心肺复苏(cpr) & 心血管急救(ecc)指南标准设计，经国内权威专家建议指导下，集国外同类产品之长处及公司科技人员的共同努力，率先开发出专门针对社会心肺复苏普及与医学院校、医疗卫生系统培训使用的高档型第七代新产品，其造型更完美、功能更强大、操作更方便的领先急救训练模拟人产品。

功能介绍：

液晶彩显：人工呼吸与胸外按压、模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示。(按压过程中和急救成功后多会显示模拟心脏搏动和模拟心电图显示)

模拟标准气道开放；

人工手位胸外按压时：

1、动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域)由条码绿灯显示、按压深度不够(小于5cm)由条码黄色、按压深度过深(大于6cm)由条码红色指示灯移动的动态反馈显示cpr按压深度。(错误按压偏上、下、左、右多有指示灯光及语音报警提示)

2、液晶计数显示；详细记录按压错误的各种原因（按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数）。

3、语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的各种原因，以便训练者及时改正。

人工口对口呼吸(吹气)时：

1、动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml~600ml-1000ml）由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度；

2、液晶计数显示：详细记录吹气错误的各种原因（按吹气量过大、吹气力量过小、及吹气正确的次数）

3、语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的各种原因，以便训练者及时改正。

按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）

操作周期：有效30次按压及2次人工吹气，30：2五个循环周期cpr操作。

操作频率：最新国际标准：至少100次/分。

操作方式：训练操作；考核操作(专业考核、普及考核)。

操作时间：以秒为单位计时。

语言设定：全程中文语音提示，可调节音量设定或关闭语言提示设定。

成绩打印：操作结果可热敏打印长条和短条成绩单

模拟人生命体征变化：初始状态时，模拟人瞳孔散大颈动脉无搏动，按压过程中颈动脉被动搏动搏动频率与按压频率一致，抢救成功后模拟人瞳孔恢复正常颈动脉自主搏动。

电源状态：采用220v电源，经过稳压器稳压输出电源24v。

材料特点：

面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

标准套配置：

高级复苏全身人体模型一具；

高级电脑液晶显示器一台； 豪华手拉推式人体硬塑箱一只； 复苏操作垫一条；

屏障面膜(50张/盒)一盒； 可换肺囊装置四套； 可换面皮一只；

热敏打印纸二卷 2010国际最新操作指南光盘1盘 现场急救常用技术使用手册 1本

使用说明书一本。 保修卡、合格证；