

山东易航专业供应复苏人

产品名称	山东易航专业供应复苏人
公司名称	山东易航驾培设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:易航
公司地址	山东聊城开发区
联系电话	0635-2111831 18663016281

产品详情

产品采用美国心脏学会(aha)2010国际心肺复苏(cpr) & 心血管急救(ecc)指南标准, 经国内权威专家建议指导下, 集国外同类产品之长处及公司科技人员的共同努力, 率先开发出专门针对社会心肺复苏普及与医学院校、医疗卫生系统培训使用的高档型第七代新产品, 其造型更完美、功能更强大、操作更方便的领先产品。

功能：模拟标准气道开放显示、语言提示；

人工呼吸及胸外按压时液晶屏上：心电模拟动态显示；模拟心脏动态显示；

人工手位胸外按压时：1、条码指示灯显示按压强度；2、数码计数显示；3、语言提示：

· 按压深度正确(4-5cm区域) 由条码绿灯、按压深度不够(小于4cm)由条码黄色、按压深度过深(大于5cm) 由条码红色指示灯移动的动态反馈显示cpr按压深度；

人工口对口呼吸(吹气)时：1、条码指示灯显示潮气量；2、数码计数显示；3、语言提示：

· 吹入的潮气量正确(500ml~600ml) 由条码绿灯、· 吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度；

按压与人工呼吸比：30：2(单人或双人)

操作周期：次有效人工吹气，再按压与人工吹气30：2五个循环周期cpr操作。

操作频率：最新国际标准：100次/分。

操作方式：训练操作；考核操作。

操作时间：以秒为单位计时。

语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。

成绩打印：操作结果可热敏打印长、短成绩单。

检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。

检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。