

高级半身心肺复苏训练模拟人，半身急救模型

产品名称	高级半身心肺复苏训练模拟人，半身急救模型
公司名称	上海中弘科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中弘科教 型号:ZH/CPR200S
公司地址	上海市松江区中辰路225号-11
联系电话	021-64049756 13661681239

产品详情

上海中弘公司开辟专用急救通道，心肺复苏系列产品,为推动急救事业发展而努力！销售电话：021-64049756 64049758

网址：<http://www.shzhonghong.com>

我们已经讲到过太多的自救措施，但是当灾难与意外袭来时，个人的力量总是渺小的，更多的时候我们需要来自同类的善意与帮助才能逃脱生命威胁。心肺复苏术，这几个字放在眼前的时候是一个太过专业的术语，作为非专业医护人员的我们见到这个词的机会并不多。但它却真正和生命息息相关。心肺复苏术并不是一种可以用来自救的措施，但确实是一种非常有用的急救措施，你会与不会的区别可能就是眼前的生命生与死的区别。当由于溺水、触电、窒息、煤气中毒等不同原因造成的意识昏迷心搏骤停现象出现时，需要在4—6分钟内采取的急救措施之一就是心肺复苏术(cpr)。因为当人体处于呼吸停止的窒息状态时，大脑也会处于缺氧状态，当脑细胞的缺氧状态持续达4分钟的时候就会造成损伤，一般情况下，当缺氧状态长达10分钟以上时，脑细胞所受到的伤害将是难以逆转的。所以对于急需施行复苏术的病人来讲，这也是场时间与死亡的赛跑。因此上海中弘科教设备有限公司专业生产此类提供急救练习的假人模型，已便让更多的人民练习熟悉掌握心肺复苏术的基本技巧。

名称：高级半身心肺复苏训练模拟人，半身急救模型 型号：zh/cpr200s

产品介绍:

该高级半身心肺复苏训练模拟人

产品采用美国心脏学会(aha)2010国际心肺复苏(cpr) & 心血管急救(ecc)指南标准, 经国内权威专家建议指导下, 集国外同类产品之长处及公司科技人员的共同努力, 并在原来的zh/cpr180型的基础上进行升级, 率先开发出专门针对社会心肺复苏普及与医学院校、医疗卫生系统培训使用的经济型第六代新产品, 其造型更完美、功能更强大、操作更方便的领先产品。高级半身心肺复苏型

执行标准: 美国心脏学会(aha)2010国际心肺复苏(cpr) & 心血管急救(ecc)指南标准

功能特点: 模拟标准气道开放显示; 人工手位胸外按压指显示报警:

- 按压位置正确, 错误的指示灯显示, 错误报警;
- 按压强度正确(4-5cm区域), 错误(4-5区域)的显示分别由条形(黄绿红)数码指示灯移动的动态反馈显示cpr按压深度正确, 错误的报警提示;
- 人工口对口呼吸(吹气)显示报警;
- 吹入的潮气量 500ml/600ml-1000ml 的显示分别由条形(黄绿红)数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量及错误的报警提示;
- 吹入的潮气量过快或超大, 造成气体进入胃部指示灯显示及报警;
- 按压与人工呼吸比: 30 2(单人或者双人);
- 操作周期: 先有效胸外按压30次再有效2次人工吹气既30:2五个循环周期cpr操作;
- 操作频率: 最新国际标准: 100/分钟; 操作方式: 训练操作;
- 检查瞳孔反映: 模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识;
- 电源状态: 采用220v外接电源, 经过稳压器稳压输出电源6v。

材料特点:

面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发, 采用进口热塑弹性体混合胶材料, 由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成, 具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形, 拆装更换方便等特点, 其材料达到国外同等水平。

标准套配置: 高级复苏半身模拟人一具; 电子显示器一台; 高级豪华超厚牛津袋一只; 复苏操作垫一条; 一次性消毒屏障面膜(50张/盒)一盒; 可换肺囊装置四套;

使用手册一本。