

电子人体气管插管训练模型，气管插管模型

产品名称	电子人体气管插管训练模型，气管插管模型
公司名称	上海中弘科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中弘科教 型号:ZH-5S
公司地址	上海市松江区中辰路225号-11
联系电话	021-64049756 13661681239

产品详情

名称：电子人体气管插管训练模型，气管插管模型，成人气管插管训练模型 型号：zh-5s

产品介绍：

在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子灯光显示及报警功能；

进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，电子灯光显示及报警功能。

进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子灯光报警功能。

一、人体气管插管训练模型用途：本模型适用于医护院校的学生，初级临床医护人员、各类现场急救人员培训，经口腔进行气管插管技术的教学演示和实习操作。

二、人体气管插管训练模型特点：

- 1、人体造型逼真、训练操作时临床感强。
- 2、电器电路安全可靠，传感器灵敏度高，声、光与电相结合。

三、训练内容：

- 1、经口腔进行气管插管。
- 2、观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。

3、指示环甲膜穿刺部位。

四、操作方法：

1、操作者站模型头侧。将头后仰 80 度，使口、咽、气管基本重迭一条线，将口张开。

2、左手持咽喉镜呈直角倾向喉头。顺舌背深入口腔，至舌根处，稍稍上提喉镜，看到会厌边缘后，将喉镜片前端于会厌与舌根交界处，然后上提喉镜，即可见到声门。

3、右手持气管导管，对准声门插入，插过声门约 1cm，控制仪即绿灯闪亮，并伴有报警。迅即拔除导管芯，再将导管继续旋转深入气管 3-4cm。

4、如控制仪红灯闪亮，并发报警声响时，告示导管误插入食管，应迅速拔出重插。

5、于气管导管旁侧塞一牙垫，退出喉镜，用胶布妥善固定导管及牙垫。

6、用注射器向导管套囊注入适量空气、气囊管末端若无自动球阀，则用钳夹闭。

五、人体气管插管训练模型功能：

1、模型的舌富有弹性，能下压，会厌能随舌根活动而更接近临床实际，方便了暴露声门。

2、能活动的下颌和颈关节使操作者逼真感觉。

3、传感器正确测出插管位置。控制仪用声、光告示训练者操作的正确与错误。

4、正常与散大的瞳孔可供示教。

六、保养方法与注意事项：

1、请按模型使用方法进行操作。使用完毕后擦洗干净放置在干燥处。

2、模型应避免日光照射和曝晒，防止人体变型和褪色。

3、不熟悉模型结构者，请勿自行拆卸，防止组件损坏。

4、人体皮外套污染，可用纱布或药棉蘸稀释洗涤剂揩擦。

5、本模型工作电压：200-24v。如地区电压不稳，请采用稳压措施。

6、本模型在购买日期一年内或合同规定的保修期内，若发生任何因制造工艺或原件（除人为造成外）的故障等质量问题，本公司负责免费维修服务。并承诺终身维护（耗材除外），费用用户自负。