

立式甘露醇恒温箱

产品名称	立式甘露醇恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

立式甘露醇恒温箱公司介绍

北京福意电器有限公司自成立以来，在全体员工共同努力下，凭信息、产品、售后之优势已同各行各业的用户朋友建立了友好的合作伙伴关系，树立了良好的信誉，得到他们*的好评和大力优良。产品有：医疗恒温箱、手术室保温柜、干燥柜、便携式药品冷藏盒、医用冷藏柜、实验室恒温箱、车载药品保存箱，车载压缩机冰箱、车载样品保存箱、药物运输保温箱

立式甘露醇恒温箱用途：

在临床上,常遇到有结晶的甘露醇。以前是将溶液放入热水中,然后取出用力摇,费时费力,甚加热煮沸,有时遇到难溶解的,需几小时都不能*溶解,经常导致瓶签破损,甚瓶身破裂。福意联甘露醇恒温箱，作为新型溶解甘露醇结晶设备，微电脑控温，优良PTC陶瓷加热，温度均匀稳定，不损坏瓶体及药性，方便可靠。3已经在各大广泛使用。

立式甘露醇恒温箱参数：

产品型号 容积大小 温度范围
外型尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L
温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48

外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48
外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48
外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48
外型尺寸:595*680*1805mm-----型号:FYL-YS-828L
828L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L
温度:2~48
外型尺寸:1267*680*2105mm-----型号:FYL-
YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L
温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100
外型尺寸:595*675*1795mm-----

立式甘露醇恒温箱使用方法：

加热溶解前确认结晶甘露醇，瓶体无裂缝，药液在有效期内，然后根据甘露醇加热柜体积大小放入相应数量的甘露醇竖放于托盘上，启动甘露醇加热柜，调节温度加热后，体积小的结晶可基本溶解，体积大的结晶明显缩小，如结晶较多或较大加热短时间未溶解的，在放入甘露醇加热柜内高温存放数小时后，结晶即可溶解。溶解后待甘露醇结晶溶解液体温度与体温相近后立即使用，也可在调25度以上，防止甘露醇再次结晶。

立式甘露醇恒温箱相关：甘露醇注射液作为高渗透降压药，是临床抢救特别是脑部疾患抢救常用的种药物，具有降低颅内压药物所要求的降压快、疗效准确的特点。作为片剂用赋形剂，甘露醇无吸湿性，干燥快，化学稳定性好，而且具有爽口、造粒性好等特点，用于抗癌药、抗菌药、抗组织胶药以及维生素等大部分片剂。此外，也用于醒酒药、口中清凉剂等口嚼片剂。在食品方面，该品在糖及糖醇中的吸水性优良小，并具有爽口的甜味，用于麦芽糖、口香糖、年糕等食品的防粘，以及用作糕点防粘粉。也可用作糖尿病患者用食品、健美食品等低热值、低糖的甜味剂。在工业上，甘露醇可用于塑料，制松香酸酯及人造甘油树脂、*、优良(硝化甘醇)等。在化学分析中用于硼的测定，生物检验上用作细菌培养剂等。甘露醇虽可被人的胃肠所吸收，但在体内并不蓄积。被吸收后，部分在体内被代谢，另部分从尿中排出；经*反应可制得露糖醇。