

药房用甘露醇加热器

产品名称	药房用甘露醇加热器
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

药房用甘露醇加热器公司介绍

北京福意电器有限公司经过多年的发展，公司产品已涵盖实验设备域的多个方面，行销优良二十多个省市，在生命科学、医疗、科研院校、电子、化工、冶金、制药等其他众多域得到了广泛的应用。广大用户的xinlai是不懈的追求，用户的优良就是我们的成功，我们将致力于振兴民族工业，为广大客户提供更满意的产品和售后。

药房用甘露醇加热器用途：

冬天25%甘露醇注射液容易结晶，给输液治疗带来麻烦。临床上通常使用电炉煮沸法溶解结晶，此法存在工作效率低、缺乏安全性等诸多缺点。福意联甘露醇恒温箱，作为新型溶解甘露醇结晶设备，微电脑控温，优良PTC陶瓷加热，温度均匀稳定。37~42度的环境里进行溶解，或25~27度的环境下保温，优良大方便解决甘露醇结晶溶解问题，提升护理工作者的工作效率，已经在各大广泛使用。

药房用甘露醇加热器参数：

产品名称:FYL-YS-150L 额定电压:220V额定频率:50Hz额定输入功率:100W箱体尺寸:(W*D*H):595*570*865mm有效容积:150L温控范围:2-48	产品名称:FYL-YS-280L额定电压:220V额定频率:50Hz额定输入功率:160W箱体尺寸:(W*D*H):595*570*1445mm有效容积:280L温控范围:2-48	产品名称:FYL-YS-430L额定电压:220V额定频率:50Hz额定输入功率:160W箱体尺寸:(W*D*H):595*680*1805mm有效容积:430L温控范围:2-48
产品型号:FYL-YS-151L 额定电压:AC220V 额定输入功率:120W 噪音(声功计):42dB(A) 箱体尺寸(W*D*H):595*565*860mm 内部尺寸(W*D*H):504*487*634mm 有效容积:150L 净重:64kg 温度范围:0-100	产品型号:FYL-YS-281L 额定电压:AC220V 额定输入功率:160W 噪音(声功计):46dB(A) 箱体尺寸(W*D*H):595*565*1440mm 内部尺寸(W*D*H):504*487*1215mm 有效容积:280L 净重:99kg 温度范围:0-100	产品型号:FYL-YS-431L 额定电压:AC220V 额定输入功率:200W 噪音(声功计):48dB(A) 箱体尺寸(W*D*H):595*675*1795mm 内部尺寸(W*D*H):504*598*1570mm 有效容积:430L 净重:129kg 温度范围:0-100

药房用甘露醇加热器使用方法：

- 1、先确认甘露醇恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、确认甘露醇结晶程度，如果甘露醇结晶比较严重，已形成絮状结晶或块状，需要42度以上温度经行溶解，等*溶解后把温度调为37度恒温保存；如果甘露醇没有结晶现象，只需要37度恒温保存，防止结晶及使用。
- 3、根据箱体大小放入相应的甘露醇瓶数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保甘露醇瓶完好不破裂现象。
- 4、使用者应根据甘露醇用量和甘露醇结晶情况来合理安排放入甘露的数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

甘露醇反复加温可以吗？会引起药物变性吗？

甘露醇在干燥状态下及溶液中稳定。其溶液可过滤灭菌或热压灭菌，必要时也可重复热压灭菌而不影响

其理化性质。因此，加热时如果包装袋完整无破损，反复加热不影响使用。