

医用甘露醇加热器

产品名称	医用甘露醇加热器
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

我们北京福意电器有限公司拥有一支充满活力的高素质销售队伍；我们拥有一支优良、经验丰富的售后售后队伍；我们更拥有一批具有丰富仪器知识和应用经验的人员。这是北京福意电器有限公司成功和发展的根本保障，是我们的信心所在，也是客户寄以信任的基础。公司产品适用于高校、、科研院所、防疫站、卫生所、实验室、疾控、药店、食品检测、采样、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。

医用甘露醇加热器用途：

甘露醇注射液结晶后无法使用，每年11月-4月不易保存,容易结晶。必须把结晶颗粒*溶解后方可使用，通常医用都会采用微波炉或者热水烫的方式，但是危险程度极大，容易产生瓶装或袋装的甘露醇注射液包装产生爆破！所以甘露醇防止结晶和溶解结晶成了医用难题。福意联甘露醇注射液防结晶保存柜，可用于已经结晶甘露醇在温度37~42度的环境里进行溶解，或25~27度的环境下保温，防止结晶现象的发生。

医用甘露醇加热器参数：

商品型号	功率	外形尺寸	商品容量	温度范围
FYL-YS-150L	100W	595*570*865mm	150L	2-48
FYL-YS-230L	160W	595*590*1215mm	230L	2-48
FYL-YS-280L	160W	595*570*1445mm	280L	2-48
FYL-YS-310L	160W	515*530*1185mm	310L	2-48
FYL-YS-430L	160W	595*680*1805mm	430L	2-48
FYL-YS-151L	120W	595*565*860mm	150L	0-100
FYL-YS-281L	160W	595*565*1440mm	280L	0-100
FYL-YS-431L	220W	595*675*1795mm	430L	0-100
FYL-YS-828L	360w	1267*680*1818mm	828L	2-48
FYL-YS-1028L	360w	1267*680*2105mm	1028L	2-48

医用甘露醇加热器使用方法：

- 1、先确认甘露醇恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、确认甘露醇结晶程度，如果甘露醇结晶比较严重，已形成絮状结晶或块状，需要42度以上温度经行溶解，等*溶解后把温度调为37度恒温保存；如果甘露醇没有结晶现象，只需要37度恒温保存，防止结晶及使用。
- 3、根据箱体大小放入相应的甘露醇瓶数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保甘露醇瓶完好不破裂现象。
- 4、使用者应根据甘露醇用量和甘露醇结晶情况来合理安排放入甘露醇的数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用甘露醇加热器相关：甘露醇的降颅压作用，不仅是单纯的利尿，而且主要在于造成生物渗透压增高，使脑组织的水分吸入生物，从而减轻脑水肿、降低颅内压。一般在静脉注射后20分钟内起作用，2-3小时降压作用达到高峰，可维持4-6小时。常用剂量为0.25-0.5 g/kg.次成人用量。但多年的临床实践证明，甘露醇除了能引起低钾，诱发或加衰，血尿、肾功不全、肾功衰竭及过敏反应外还具有其他并发症。